

14. marec 2019

**NUJNO – OBVESTILO O VARNOSTNEM POPRAVLJALNEM UKREPU**

Vrsta ukrepa	Odpoklic
Referenčna oznaka Teleflex	EIF-000353
Trgovsko ime	Filter Gibeck HME + nastavek katetra Nastavek katetra RUSCH Komplet priključkov RUSCH za dihalne cevi Priključki RUSCH za dihalne cevi
Koda izdelka/številka serije	Oglejte si Dodatek 4

Spoštovana stranka,

**Podrobnosti o prizadetih izdelkih**

Podjetje Teleflex je objavilo prostovoljni varnostni popravljalni ukrep za zgoraj navedene izdelke. Za seznam kod in serij prizadetih izdelkov glejte Dodatek 4.

**Opis težave in ukrepov, ki zahtevajo takojšno pozornost**

Podjetje Teleflex Medical je objavilo varnostni popravljalni ukrep za zgoraj navedene izdelke, ker obstaja možnost, da se vrtljivi priključki in priključki Cobb med uporabo odklopijo. Če se odklop zgodi pred uporabo, bo uporabnik to lahko zlahka zaznal med namestitvijo. Če se odklop zgodi med uporabo, kar boste opazili kot puščanje iz dihalne napeljave, se bodo sprožili alarmi za tlak na ventilatorju, kar lahko zahteva poseg za zamenjavo priključka z drugim nastavkom za kateter ali priključitev dihalne napeljave neposredno na endotrahealni tubus, dokler ni na voljo nov nastavek za kateter. Če pride do zamika pri zamenjavi nastavka katetra ali pri priključitvi dihalne napeljave, lahko puščanje privede do desaturacije, dokler ne zamenjate nastavka za kateter in ponovno ne vzpostavite normalne ventilacije.

Iz naših dokumentov je razvidno, da ste prejeli izdelek, ki je predmet tega varnostnega popravljalnega ukrepa. Vse stranke pozivamo, da ukrepajo, kot sledi.

**Pomembna opomba: upoštevajte spodaj navedene ukrepe samo za navedeno lokacijo naprave:**

Lokacija naprave	Številka seznama ukrepov
Domače okolje	1
Zdravstvene ustanove (bolnišnice, zdravstveno osebje itd.)	2
Distributerji	3

## Številka seznama ukrepov 1

### Domače okolje

1. Preverite zalogo izdelkov, ki jih zajema ta varnostni popravljalni ukrep. Za seznam prizadetih kod in serije prizadetih izdelkov glejte Dodatek 4. Uporabniki morajo **prenehati z uporabo** prizadetih izdelkov ter takoj izolirati vse prizadete izdelke. Za pomoč se obrnite na zastopnika službe za pomoč strankam.
2. Če se izdelek, ki je naveden v Dodatku 4, že uporablja, Teleflex priporoča, da nastavek katetra zamenjate. Za kode nadomestnih izdelkov Teleflex glejte Dodatek 3.
3. Če na zalogi nimate izdelkov, ki so navedeni v Dodatku 4, potem odključajte ustrezno polje na potrditvenem obrazcu (Dodatek 1) in obrazec vrnite po faksu ali e-pošti na spodaj naveden e-poštni naslov.
4. Če imate prizadete izdelke, ki so navedeni v Dodatku 4, potem odključajte ustrezno polje na potrditvenem obrazcu (glejte Dodatek 1) in se obrnite na službo za pomoč strankam, tako da pokličete na telefonsko številko, navedeno v nadaljevanju, in posredovali vam bomo povratno številko. To številko vpišite v ustrezno polje na potrditvenem obrazcu in ga takoj pošljite službi za pomoč strankam.
5. Podjetje Teleflex (ali lokalni zastopnik) bo po prejemu vrnjenega prizadetega izdelka izdalo dobropis.
6. **Za dodatne informacije ali podporo pri nabavi alternativnega izdelka se obrnite na zastopnika službe za pomoč strankam.**

## Številka seznama ukrepov 2

### Zdravstvene ustanove

1. Preverite zalogo izdelkov, ki jih zajema ta varnostni popravljalni ukrep. Uporabniki morajo prenehati z uporabo in distribucijo prizadetih izdelkov ter takoj izolirati vse prizadete izdelke. Zdravstvene ustanove imajo dve možnosti
  - a. Vse izdelke, ki so zajeti v ukrepu, lahko vrnete Teleflexu. Za seznam kod in serij prizadetih izdelkov glejte Dodatek 4.
  - b. Lahko pa tudi pregledate in vrnete samo pokvarjene izdelke. Za podrobnosti o navodilih za pregled izdelkov glejte Dodatek 2.
2. Če je izdelek, ki ga zajema ukrep, in situ, Teleflex priporoča, da nastavek katetra zamenjate. Za kode nadomestnih izdelkov Teleflex glejte Dodatek 3.
3. Če na zalogi nimate izdelkov, ki so navedeni v tem varnostnem popravljalnem ukrepu, potem odključajte ustrezno polje na potrditvenem obrazcu (Dodatek 1) in obrazec vrnite po faksu ali e-pošti na spodaj naveden e-poštni naslov.
4. Če imate prizadete izdelke, ki so navedeni v tem varnostnem popravljalnem ukrepu, potem odključajte ustrezno polje na potrditvenem obrazcu (glejte Dodatek 1) in se obrnite na službo za pomoč strankam, tako da pokličete na telefonsko številko, navedeno v nadaljevanju, in posredovali vam bomo povratno številko. To številko vpišite v ustrezno polje na potrditvenem obrazcu in ga takoj pošljite službi za pomoč strankam.
5. Podjetje Teleflex (ali lokalni zastopnik) bo po prejemu vrnjenega prizadetega izdelka izdalo dobropis.

## Številka seznama ukrepov 3

### Distributerji

1. Posredujte to varnostno obvestilo vsem strankam, ki so prejele izdelke, zajete v ta ukrep. Stranke morajo nato izpolniti potrditveni obrazec in vam ga vrniti.
2. Za seznam nadomestnih izdelkov Teleflex glejte Dodatek 3, če v zvezi s tem potrebujete pomoč, pokličite Teleflexovo službo za pomoč strankam.
3. Preverite zalogo izdelkov, ki jih zajema ta varnostni popravljalni ukrep. Prenehajte z uporabo in distribucijo prizadetih izdelkov ter takoj izolirajte vse prizadete izdelke. Distributerji imajo dve možnosti
  - a. Vse izdelke, ki so zajeti v ukrepu, lahko vrnete Teleflexu. Za seznam kod in serij prizadetih izdelkov glejte Dodatek 4.
  - b. Lahko pa tudi pregledate in vrnete samo pokvarjene izdelke. Za podrobnosti o navodilih za pregled izdelkov glejte Dodatek 2.
4. Kot distributer morate podjetju Teleflex potrditi, da ste izvedli vse potrebne ukrepe odpoklica, ki so navedeni zgoraj. Po izvedbi vseh ukrepov pošljite izpolnjen potrditveni obrazec službi za pomoč strankam.
5. Vse pristojne organe v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora/Švici (EGP/CH) in Turčiji, kjer podjetje Teleflex opravlja neposredno distribucijo izdelka, bo obvestilo podjetje Teleflex.
6. Če ste izdelek distribuirali tudi izven svoje države, o tem obvestite Teleflex s povratno elektronsko pošto na spodaj navedeni e-poštni naslov.
7. Če ste distributer in/ali ste odgovorni za poročanje v ali izven območja EGP/CH/TK, vas prosimo, da o tem ukrepu obvestite lokalni pristojni organ. Obvestilo in vso komunikacijo med vami in lokalnim pristojnim organom posredujte podjetju Teleflex.

### Teleflex

Podjetje Teleflex bo o tem varnostnem popravljalnem ukrepu obvestilo vse stranke, zaposlene v podjetju Teleflex in distributerje.

### Posredovanje obvestila o varnostnem popravljalnem ukrepu

To obvestilo je treba posredovati vsem znotraj organizacije, ki jih zadeva, ali vsem organizacijam, ki so prejele potencialno prizadete izdelke. Poskrbite, da bodo s tem obvestilom seznanjeni končni uporabniki, klinični zdravniki, odgovorno osebje za obvladovanje tveganja, oskrbovalna veriga/distribucijski centri itd. Ohranite ozaveščenost o tem obvestilu, dokler v vaši organizaciji ne bodo opravljeni vsi potrebni ukrepi.

### Oseba za stik

Za dodatne informacije ali pomoč glede te težave se obrnite na:

**Služba za pomoč strankam:**

**Stik:** Shane Kenny

**FAKS:** +353 (0) 1 4370773

**Telefon:** +353 (0)90 6460869

**E-pošta:** Recalls.Intl@teleflex.com

Vse pristojne organe v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora/Švici (EGP/CH) in Turčiji, kjer podjetje Teleflex opravlja neposredno distribucijo izdelka, bo obvestilo podjetje Teleflex. Pri podjetju Teleflex težimo h kakovosti, varnosti in učinkovitosti naših izdelkov. Iskreno se opravičujemo za vse morebitne nevednosti, ki smo vam jih povzročili s tem ukrepom. Za vsa dodatna vprašanja se obrnite na lokalnega prodajnega zastopnika ali službo za pomoč strankam.

*Za in v imenu podjetja Teleflex,*

**Padraig Hegarty**

*Padraig Hegarty*

*Podpredsednik za globalno zagotavljanje kakovosti (v proizvodnji)*

**VARNOSTNI POPRAVLJALNI UKREP  
POTRDITVENI OBRAZEC****ZAHTEVA TAKOJŠNJO POZORNOST**

Ref. EIF-000353

IZPOLNJEN OBRAZEC TAKOJ VRNITE NA:

FAKS: +353 (0) 1 4370773

E-pošta: Recalls.Intl@teleflex.com

<input type="checkbox"/> Potrjujemo prejem obvestila o varnostnem popravljalnem ukrepu in da smo izvedli navedene potrebne ukrepe. Potrjujemo, da naš inventar <b>NE</b> vsebuje izdelkov, za katere velja ta varnostni popravljalni ukrep.	<input type="checkbox"/> Potrjujemo, da smo prejeli to varnostno obvestilo in izvedli vsa potrebna dejanja, ki jih obvestilo vsebuje. Potrjujemo, da naš inventar <b>VKLJUČUJE</b> izdelke, za katere velja ta varnostni popravljalni ukrep. Uporaba in nadaljnja distribucija prizadetih izdelkov sta ustavljeni. Vsi prizadeti izdelki so vzeti iz uporabe in spodnja količina bo vrnjena.  Št. dovoljenja za vračilo _____
---	---

**ŠTEVILKE ZA KOLIČINO IZDELKOV NAJ BODO NAPISANE ČITLJIVO**

ŠTEVILKA IZDELKA	ŠTEVILKA SERIJE	KOLIČINA (za vračilo)
<ul style="list-style-type: none"><li>• V vračilni paket z vrnjenimi enotami priložite kopijo <b>izpoljenega potrditvenega obrazca</b>.</li><li>• Poskrbite, da bo <b>številka RAN jasno vidna</b> na vračilnem paketu.</li><li>• Vrnjene izdelke označite kot »<b>Vrnjeni odpoklicani izdelki</b>«</li></ul>		

Izpolnite ta potrditveni obrazec in ga takoj pošljite po faksu ali e-pošti na zgoraj navedeno številko ali naslov.

<b>IME USTANOVE (NPR. IME BOLNIŠNICE, ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE)</b>	
<b>NASLOV USTANOVE</b>	<b>Telefon/faks</b>
<b>OBRAZEC JE IZPOLNIL:</b>	<b>Žig</b>
IME S TISKANIMI ČRKAMI: _____	
PODPIS: _____	
<b>DATUM</b>	


## NAVODILA ZA PREGLED

### Veljajo samo za zdravstvene ustanove in distributerje

Izdelek, ki ga zajema ta varnostni popravljalni ukrep, ima na priključku Cobb odtisnjeno identifikacijsko številko (ID). Ker Teleflex ni mogel določiti obsega s pomočjo številke serije, lahko izdelke ločite na skladne in neskladne na podlagi številke ID. To je izbirni korak za pregled, ki velja samo za zdravstvene ustanove in distributerje. Če želite vrniti kode in serije izdelkov, ki jih ukrep zajema, brez izvedbe pregleda, lahko storite tudi to.

#### Navodila:

1. Če je izdelek še vedno v embalaži (tj. ni in situ), ga boste morda morali premakniti v embalaži, da bo številka ID jasno vidna. Za lokacijo številke ID glejte spodnjo Sliko 1 in Sliko 2.
2. Izdelek je treba vizualno pregledati, da odčitate številko ID, ki je odtisnjena na izdelku.
3. Če je številka ID navedena v spodnji tabeli 1, je to potencialno neskladen izdelek, ki ga morate vrniti podjetju Teleflex.
4. Če številka ID ni navedena v spodnji tabeli 1, to pomeni, da so ti izdelki skladni in jih lahko obdržite za nadaljnjo uporabo /distribucijo.

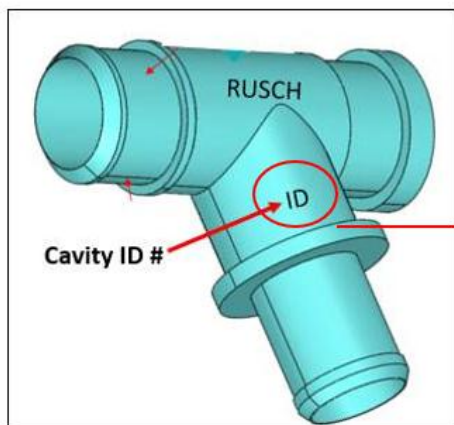

Slika 1 – Priključek Cobb



Slika 2 – Identifikacijska številka (ID)

Številke ID	
<b>Neskladni izdelek</b>	
39	Če so na nastavku katetra odtisnjene naslednje številke ID: 39, 42, 45 ali 48 <b>ga vrnite</b> podjetju Teleflex
42	
45	
48	

Tabela 1

Komentarji in kode nadomestnih izdelkov Teleflex				
Koda izdelka in obseg ukrepa	Nadomestni izdelek 1	Nadomestni izdelek 2	Nadomestni izdelek 1 – pripomba	Nadomestni izdelek 2 – pripomba
191010-000100	191009-000100	22531	fiksno koleno	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata
191010-000150	191009-000150	22531	fiksno koleno	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata
191010-000200	191019-000200	22531	fiksno koleno	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata
191010-T00150	22531	-	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata	-
191011-000050	191009-000050	22531	fiksno koleno	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata
191011-000100	191009-000100	22531	fiksno koleno	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata
191011-000150	191009-000150	22531	fiksno koleno	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata
191011-000200	191019-000200	22531	fiksno koleno	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata
191011-000300	191020-000300 (samo v 22F)	22531	ravni priključek	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata
191013-000150	191009-000150	22531	fiksno koleno	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata
191013-000200	191019-000200	22531	fiksno koleno	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata
191013-000250	191020-000300	22531	ravni priključek v 30 cm	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata
191014-000100	191025-000100	22531	fiksno koleno	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata
191014-000150	22531	-	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata	-
191014-000200	22531	-	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata	-
191014-T00150	22531	-	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata	-
191015-000050	191021-000050	22531	ravni priključek	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata
191015-000100	191025-000100	22531	fiksno koleno	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata
191015-000150	22531	-	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata	-
191015-000200	22531	-	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata	-

Komentarji in kode nadomestnih izdelkov Teleflex				
Koda izdelka in obseg ukrepa	Nadomestni izdelek 1	Nadomestni izdelek 2	Nadomestni izdelek 1 – pripomba	Nadomestni izdelek 2 – pripomba
191015-T00150	22531	-	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata	-
191033-000000	191009-000100	22531	fiksno koleno	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata
191034-000000	191009-000100	22531	fiksno koleno	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata
191036-000000	22531	-	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata	-
191037-000000	22531	-	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata	-
191525-000000	1624	-	Kolenski priključek brez vrtljivega elementa	-
191526-000000	1624	-	Kolenski priključek brez vrtljivega elementa	-
191527-000000	1624	-	Kolenski priključek brez vrtljivega elementa	-
191569-000000	1624	-	Kolenski priključek brez vrtljivega elementa	-
191657-000150	19092	-	fiksno koleno in filter	-
191658-000100	19092	-	fiksno koleno in filter	-
191658-000150	19092	-	fiksno koleno in filter	-
191659-000150	19092	-	fiksno koleno in filter	-
191727-000150	22531	-	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata	-
191727-000200	22531	-	14–20 cm z dvojnimi vrtljivimi elementi, ampak samo z 22F na strani aparata	-
191771-518150	19092	-	fiksno koleno in filter	-

Ime izdelka	Koda izdelka	Številka serije/serijska številka	Ime izdelka	Koda izdelka	Številka serije/serijska številka
Filter Gibeck HME + nastavek katetra	191657-000150	201745	Nastavek katetra RUSCH	191015-000100	18BT13
		201749			18CT03
		201802			18CT12
		201811			18CT19
		201816			18CT27
		201818			18CT32
		201821			18DT04
		201828			18DT29
		201831			18ET21
		201832			18ET36
		201836			18FT03
		201841			18FT07
		201842			18FT30
		201852			18FT40
	191658-000100	17KT09			18FT45
		17KT20			18GT07
		17KT24			18GT15
		17LT18			18GT21
		17LT19			18GT30
		18AT29			18HT14
		18DT24			18HT21
		18FT27			18HT26
		18FT42			18HT34
		18FT44			18IT05
		18GT14			18IT24
		18GT28			18JG07
		18HT02			18JG28
		18HT16			18JG29
		18HT20			18JT05
		18IT01			18JT11
		18IT14			18KG06
		18IT19			18KG20
		18IT27		18KG31	
		18JT14		18KG32	
	191658-000150	18KT02		18KG42	
		18KT10		18KT06	
		18LT12		18LG10	
		18LT17		18LG20	
		19AT01		18LG32	
		19AT03		18LG35	
		191658-000150		17KT08	18LG36
				17KT15	18LT21
				17LT07	19AG06
17LT11			191015-000150		
17LT21	201826				
18DT24	17KT03				
18FT37	17KT10				
18GT24	17KT17				
18KT02	17KT25				
18KT24	17LT05				
18LT08	17LT12				
191659-000150	18LT26	17LT22			
	17LT10	17LT31			
	18BT04	18AT05			
	18FT36	18AT10			
191771-518150	18IT07	18AT11			
	201820	18AT18			
	201822	18AT27			
	201825	18BG09			
	201826	18BT02			
	201828	18BT07			
	201836	18BT13			
	201837	18BT20			
	201841	18CT03			
	201901	18CT12			
	201902	18CT19			
Nastavek katetra RUSCH	191010-000100	201821	18CT27		
	191010-000150	201745	18CT32		
		201748	18DT13		
			18DT14		



Ime izdelka	Koda izdelka	Številka serije/serijska številka	Ime izdelka	Koda izdelka	Številka serije/serijska številka
Nastavek katetra RUSCH	191010-000150	201802	Nastavek katetra RUSCH	191015-000150	18DT17
		201805			18DT21
		201806			18DT29
		201808			18DT30
		201809			18ET04
		201811			18ET14
		201812			18ET21
		201816			18ET27
		201828			18ET36
		201831			18FT03
		201832			18FT19
		201837			18FT23
		201839			18FT25
		201842			18FT30
		201844			18FT40
	201846	18FT45			
	191010-000200	201803			18FT49
	191010-T00150	201805			18GT15
		201810			18GT21
		201842			18GT30
	191011-000050	17KT10			18HT06
		17KT17			18HT14
		17KT25			18HT21
		17LT05			18HT26
		17LT12			18HT34
		17LT22			18IT05
		18AT18			18IT11
		18BT07			18IT17
		18BT20			18IT24
		18CT03			18JG28
		18DT13			18JT05
		18DT29			18JT11
		18ET37			18KG06
		18FT25		18KG12	
		18GT07		18KG20	
		18GT15		18KG31	
		18GT21		18KG32	
		18HT06		18KG42	
		18HT14		18LG20	
		18HT21		18LG32	
		18IT05		18LG36	
		18IT17		19AG06	
		18LG32		19AG16	
		19AG16			
	191011-000100	17KT10		191015-000200	17KT03
		17KT17			17KT10
17KT25		17KT17			
17LT05		17KT25			
17LT12		17LT05			
17LT22		17LT12			
17LT31		17LT38			
18AT11		18AT11			
18AT18		18AT18			
18BG09		18AT27			
18BT07		18BG09			
18BT13		18BT02			
18CT12		18BT07			
18CT19		18CT27			
18CT32		18DT13			
18DT04		18DT21			
18DT13		18DT29			
18DT29		18ET04			
18ET21		18ET14			
18ET36		18ET21			
18FT19		18ET27			
18FT25		18ET36			
18FT45		18FT03			
18GT04		18FT30			
18GT07	18FT40				
	18FT49				

Ime izdelka	Koda izdelka	Številka serije/serijska številka	Ime izdelka	Koda izdelka	Številka serije/serijska številka	
Nastavek katetra RUSCH	191011-000100	18GT15	Nastavek katetra RUSCH	191015-000200	18GT04	
		18GT21			18HT26	
		18GT30			18HT34	
		18HT06			18IT11	
		18HT14			18IT17	
		18HT21			18JG29	
		18HT26			18KG06	
		18HT34			18KG12	
		18IT05			19AG16	
		18IT17			19AG28	
		18IT24				
		18JG28			191015-T00150	17KT10
		18JG29				17KT17
		18JT05				17LT12
		18JT11				18AT18
		18KG06				18BT07
		18KG12				18DT13
		18KG20				18FT25
		18KG42				18FT45
		18LG10				18HT21
	18LG35			18HT34		
	18LG36			18IT11		
	18LT21			18IT24		
	19AG06			18KG31		
	19AG16			18KG32		
				18LG10		
		191011-000150		17KT03	18LG20	
				17KT10	18LG35	
				17KT17	19AG06	
				17KT25	19AG16	
				17LT05	19AT06	
				17LT12		
				17LT22	191033-000000	17KT03
				18AT05		17KT10
				18AT27		17KT25
				18BG09		17LT05
				18BT02		17LT22
				18BT07		17LT31
				18BT13		17LT38
				18CT12		18AT05
		18CT19		18BT02		
		18CT27		18BT07		
		18CT32		18BT13		
		18DT13		18BT20		
		18ET04		18CT03		
		18ET14		18CT12		
		18ET36		18CT19		
		18ET37		18CT27		
		18FT19		18ET14		
		18FT25		18ET21		
		18FT30		18ET36		
		18FT45		18FT19		
		18GT04		18FT30		
		18GT07		18FT40		
		18GT15		18FT45		
		18GT21		18GT04		
		18GT28		18GT07		
		18GT30		18GT15		
		18HT06		18GT21		
		18HT14		18GT30		
		18HT21		18HT06		
		18HT26		18HT14		
		18HT34		18HT21		
		18IT05		18HT26		
		18IT17		18IT05		
		18IT24		18IT24		
		18JG28		18JG28		
		18JG29		18JT05		
		18JT05		18KG12		
		18JT11		18LG20		
				18LG36		
				19AG06		

Ime izdelka	Koda izdelka	Številka serije/serijska številka	Ime izdelka	Koda izdelka	Številka serije/serijska številka
Nastavek katetra RUSCH	191011-000150	18KG06	Nastavek katetra RUSCH	191034-000000	201744
		18KG12			201750
		18KG31			201751
		18KG32			201803
		18LG10			201805
		18LG32			201808
		18LG36			201819
	19AG06	201820			
	191011-000200	17KT03			201822
		17KT17			201825
		17LT05			201826
		17LT12			201828
		18AT11		201829	
		18AT18		201832	
		18AT27		201839	
		18BT07		201840	
		18CT12		201842	
		18CT19		201844	
		18DT04		201846	
		18DT13		191036-000000	201744
		18DT29			201745
		18ET37			201750
		18FT03			201751
		18FT07			201752
		18FT19			201801
	18GT07	201806			
	18GT15	201807			
18GT21	201808				
18JG29	201809				
18JT05	201810				
191011-000300	18KG06	201812			
	18KG12	201817			
	18KG31	201818			
	18LG10	201819			
	17KT25	201820			
	17LT22	201821			
	18AT05	201822			
	18AT27	201823			
	18BG09	201826			
	18DT14	201827			
191013-000150	18DT17	201828			
	18FT07	201829			
	18HT14	201830			
	18IT17	201831			
	18IT24	201832			
	18JG28	201834			
	18JT11	201836			
191013-000200	18KG06	201840			
	18KG31	201848			
191013-000250	18HT26	201850			
	18JG28	17KT03			
191014-000100	18AT27	17KT10			
	18BT13	17KT25			
	18ET04	17LT05			
	18FT03	17LT22			
	18GT04	17LT31			
	18GT07	18BT02			
	18GT30	18BT07			
	18JG28	18BT13			
	18JT11	18CT12			
	18KG31	18CT32			
191037-000000	18HT06	18ET21			
	18KG31	18ET36			
	201746	18FT03			
	201747	18FT19			
		18FT25			
	18FT30				
	18FT45				
	18GT04				
	18GT21				

## EIF-000353 – Dodatek 4

Ime izdelka	Koda izdelka	Številka serije/serijska številka	Ime izdelka	Koda izdelka	Številka serije/serijska številka
Nastavek katetra RUSCH	191014-000100	201748	Nastavek katetra RUSCH	191037-000000	18HT26
		201750			18IT11
		201806			18IT24
201807		18JG07			
201808		18JG28			
201810		18JG29			
201816		18JT11			
201820		18KG12			
201822		18KG20			
201825		18KG42			
201828		18LG10			
201834		18LG20			
201836		18LG32			
201839		18LG35			
201841		18LG36			
	201843	19AG16			
	201844				
	201846				
	201848				
	191014-000150	201747		191727-000150	201744
		201748		201745	
		201749		201747	
		201752		201748	
		201801		201749	
		201802		201801	
		201803		201802	
		201805		201803	
		201803		201805	
		201804		201810	
		201805		201811	
		201806		201814	
		201810		201815	
		201811		201816	
		201814		201818	
		201815		201820	
		201816		201821	
		201817		201822	
		201818		201825	
		201819		201826	
		201820		201827	
		201821		201828	
		201822		201829	
		201825		201830	
	201826		201831		
	201827		201832		
	201829		201834		
	201830		201835		
	201831		201836		
	201834		201838		
	201835		201839		
	201836		201841		
	201837		201842		
	201841		201844		
	201842		201846		
	201843		201848		
	201845		201851		
	201846		201852		
	201847				
	201848				
	191014-000200	201745		191727-000200	201745
		201746		201747	
		201747		201802	
		201802		201805	
		201805		201810	
		201806		201811	
		201810		201815	
		201811		201820	
		201815		201821	
		201816		201823	
	201817		201826		
	201822		201828		
				191569-000000	201841
				191525-000000	201743
					201752

## EIF-000353 – Dodatek 4

Ime izdelka	Koda izdelka	Številka serije/serijska številka	Ime izdelka	Koda izdelka	Številka serije/serijska številka
Nastavek katetra RUSCH	191014-000200	201823	Prikjučki RUSCH za dihalne cevi	191525-000000	201815
		201825			201816
		201828			201818
		201847			201819
		201848			201820
		201849			201821
		201850			201823
		201852			201826
		201902			201827
	191014-T00150	201745			201828
		201746			201833
		201747			201840
		201748			201844
		201749			191526-000000
		201801		17KT17	
		201811		17LT05	
		201815		17LT12	
		201825		17LT22	
		201826		17LT38	
		201827		18AT05	
		201828		18AT11	
		201829		18BT02	
		201830		18CT12	
	201831	18DT29			
	201834	18ET04			
	201836	18ET21			
	201837	18ET27			
	191015-000050	18HT06		18FT30	
		18HT34		18FT49	
		18IT11		18GT15	
				18GT21	
	191015-000100	17KT10		18GT30	
		17KT17		18HT14	
17KT25		18JG29			
17LT12		18JT11			
17LT22		18KG12			
17LT31		18KG20			
18AT12		18KG31			
18AT18		18KG32			
18AT27		18LG10			
18BG09		18LG20			
18BT02		19AG16			
18BT07		191527-000000			
			201745		
			201746		
	201747				
		201751			
		201752			