

Pomembno obvestilo o kakovosti izdelka
Obvestilo o popravku

Liquichek Cardiac Markers Plus Control LT

Level Kit Description	Vials		Tubes	
	Catalog Number	Lot Number (Expiration: 2021-10-31)	Catalog Number	Lot Number (Expiration: 2021-10-31)
Level 1	146	67611	12004806	67611T
Level 1 MiniPak	146X	67611	12004807	67611T
Level 2	147	67612	12004808	67612T
Level 2 MiniPak	147X	67612	12004809	67612T
Level 3	148	67613	12004810	67613T
Level 3 MiniPak	148X	67613	12004811	67613T
Level 1A	27104	67614	12004812	67614T
Level 1A MiniPak	27104X	67614	12004813	67614T
Level 1B	27105	67615	12004814	67615T
Level 1B MiniPak	27105X	67615	12004815	67615T
Level 1C	27106	67616	12004816	67616T
Level 1C MiniPak	27106X	67616	12004817	67616T

*To obvestilo je namenjeno končnim uporabnikom tega izdelka.
Če niste končni uporabnik, pošljite to obvestilo ustreznemu laboratorijskemu osebju.*

Datum Januar 6, 2020
Za Direktor, vodja ali specialist kliničnega laboratorija
Od Bio-Rad Laboratories QSD Regulatory Affairs
Produkt **Liquichek Cardiac Markers Plus Control LT**
Težava Stabilnost BNP in NT-proBNP morda ne bo enka navedeni stabilnosti po odprtju, ki je navedena v spremnem listu kontrole. Stabilnost BNP in NT-proBNP je spremenjena iz 8 dni to **5 dni** kot je navedeno spodaj s poudarjenim besedilom in krepko pisavo.

Revidirani zahtevki



Pomembne spremembe so označene!

SKLADIŠČENJE IN STABILNOST



Odtaljen in odprt izdelek: Po odtalitvi, odprtju izdelka in shranjevanju pri 2 do 8 °C sta, **BNP in NT-proBNP** stabilna **5 dni**.

Revidirani spremni listi

Spremni listi, ki zdaj vključujejo spremenjeno trditev o stabilnosti za BNP in NT-proBNP v razdelku SKLADIŠČENJE IN OBSTOJNOST, so na voljo preko spletne strani <http://myeinserts.qcnet.com>.

Zahtevane spremembe

- Pridobite popravljene spremne liste Liquichek Cardiac Markers Plus Control LT, ki so voljo preko spletne strani <http://myeinserts.qcnet.com>. Zavrzite vse prejšnje različice spremnih listov za navedene serije izdelkov, ki jih imate morda na vaši lokaciji in jih nadomestite s spremenjenimi spremnimi listi.
- Če imate tehnična vprašanja v zvezi s tem obvestilom, se obrnite na službo za tehnično podporo Bio-Rad Laboratories.

Nadomestni načini za prejem spremnega lista ali navodila za uporabo (IFU) so na voljo tako, da se obrnete na lokalno pisarno Bio-Rad Laboratories na spodnjem e-poštnem naslovu:

CDG_TechSupport_EEMEA@bio-rad.com

Zahvaljujemo se za vašo potrpežljivost in se opravičujemo za morebitne nevednosti.