

Pomembno obvestilo o kakovosti izdelka
Obvestilo o popravku

Liquichek Cardiac Markers Plus Control LT

Level Kit Description	Catalog Number	Lot Number (Expiration: 2020-05-31)	(Lot Number Expiration: 2020-08-31)	Lot Number (Expiration: 2020-11-30)	Lot Number (Expiration: 2021-03-31)	Lot Number (Expiration: 2021-10-31)
Level 1	146	23671	23681	23691	67601	67611
Level 1 MiniPak	146X	23671	23681	23691	67601	67611
Level 2	147	23672	23682	23692	67602	67612
Level 2 MiniPak	147X	23672	23682	23692	67602	67612
Level 3	148	23673	23683	23693	67603	67613
Level 3 MiniPak	148X	23673	23683	23693	67603	67613
Level 1A	27104	23674	23684	23694	67604	67614
Level 1A MiniPak	27104X	23674	23684	23694	67604	67614
Level 1B	27105	23675	23685	23695	67605	67615
Level 1B MiniPak	27105X	23675	23685	23695	67605	67615
Level 1C	27106	23676	23686	23696	67606	67616
Level 1C MiniPak	27106X	23676	23686	23696	67606	67616

*To obvestilo je namenjeno končnim uporabnikom tega izdelka.
Če niste končni uporabnik, pošljite to obvestilo ustreznemu laboratorijskemu osebju.*

Datum Januar 6, 2020

Za Direktor, vodja ali specialist kliničnega laboratorija

Od Bio-Rad Laboratories QSD Regulatory Affairs

Produkt **Liquichek Cardiac Markers Plus Control LT**

Težava Stabilnost Troponina T morda ne bo enaka navedeni stabilnosti po odprtju, ki je navedena v spremnem listu kontrole. Stabilnost Troponina T je spremenjena iz 4 dni na 2 dni, kot je navedeno spodaj s poudarjenim besedilom in krepko pisavo.

Revidirani zahtevki



Pomembne spremembe so označene!

SKLADIŠČENJE IN STABILNOST



Odtaljen in odprt izdelek: Po odtalitvi, odprtju izdelka in shranjevanju pri 2 do 8 ° C, je **Troponin T stabilen 2 dni**.

Revidirani spremni listi

Spremni listi, ki zdaj vključujejo spremenjeno trditev o stabilnosti za Troponin T v razdelku SKLADIŠČENJE IN OBSTOJNOST, so na voljo preko spletne strani <http://myeinserts.qcnet.com>.

Zahtevane spremembe

- Pridobite popravljene spremne liste Liquichek Cardiac Markers Plus Control LT, ki so voljo preko spletne strani <http://myeinserts.qcnet.com>. Zavrzite vse prejšnje različice spremnih listov za navedene serije izdelkov, ki jih imate morda na vaši lokaciji in jih nadomestite s spremenjenimi spremnimi listi.
- Če imate tehnična vprašanja v zvezi s tem obvestilom, se obrnite na službo za tehnično podporo Bio-Rad Laboratories. Nadomestni načini za prejem spremnega lista ali navodila za uporabo (IFU) so na voljo tako, da se obrnete na lokalno pisarno Bio-Rad Laboratories na spodnjem e-poštnem

naslovu:

CDG_TechSupport_EEMEA@bio-rad.com

Zahvaljujemo se za vašo potrpežljivost in se opravičujemo za morebitne nevednosti.