

SKANTEH d.o.o.
Kidričeva 23
1236 TRZIN

VARNOSTNO OBVESTILO, Getinge SERIJE 88

Pomanjkljivost

Možno puščanje

Prizadet izdelek:

Model: 88-5

Rešitev

Varnostno obvestilo

Datum

2020-02-13

Prizadete serijske št.

Ref. št.

GD8980

Naprava, proizvedena pred novembrom 2012

- Serijska št. pred W50038660
- Vse naprave s SEVxxxxxxx

Spoštovana stranka:

To pismo vas obvešča o možnem puščanju na napravah, proizvedenih pred novembrom 2012. Naši zapisi kažejo, da ste kupili eno ali več čistilno-dezinfekcijskih naprav 88-5 v omenjenem obdobju / območju. Na nekaterih enotah čistilno-dezinfekcijske naprave modela 88-5 lahko pride do puščanja zaradi poškodovanih točkovnih zvarov v komori. Če pride do puščanja, ga bo opazilo bolnišnično osebje.

To sporočilo vas opozarja, da pokličete serviserja.

Uporabniški priročnik (6001234702) Varnost – pomembno!

Puščanje v sistemu, npr. zaradi dotrajanega tesnila na vratih in ga je treba nemudoma popraviti.


Naprava, ki pušča, lahko ustvari potencialno nevarno situacijo za uporabnika; tveganje za zdrs ali okužbo iz onesnažene vode. Da preprečite morebitne dogodke pri uporabnikih, ki delajo v bližini omenjene čistilno-dezinfekcijske naprave, sledite korakom na naslednji strani.

To varnostno opozorilo vsebuje pomembne informacije za nadaljnjo varno in pravilno uporabo vaše opreme.

TERENSKO VARNOSTNO OBVESTILO, GETINGE SERIJE 88

Naslednji koraki

1. Preverite serijsko številko vaše čistilno-dezinfekcijske naprave, da preverite, ali je vaša naprava v seznamu prizadetih naprav. Serijska številka se nahaja na oznaki na napravi, gl. lokacijo spodaj.

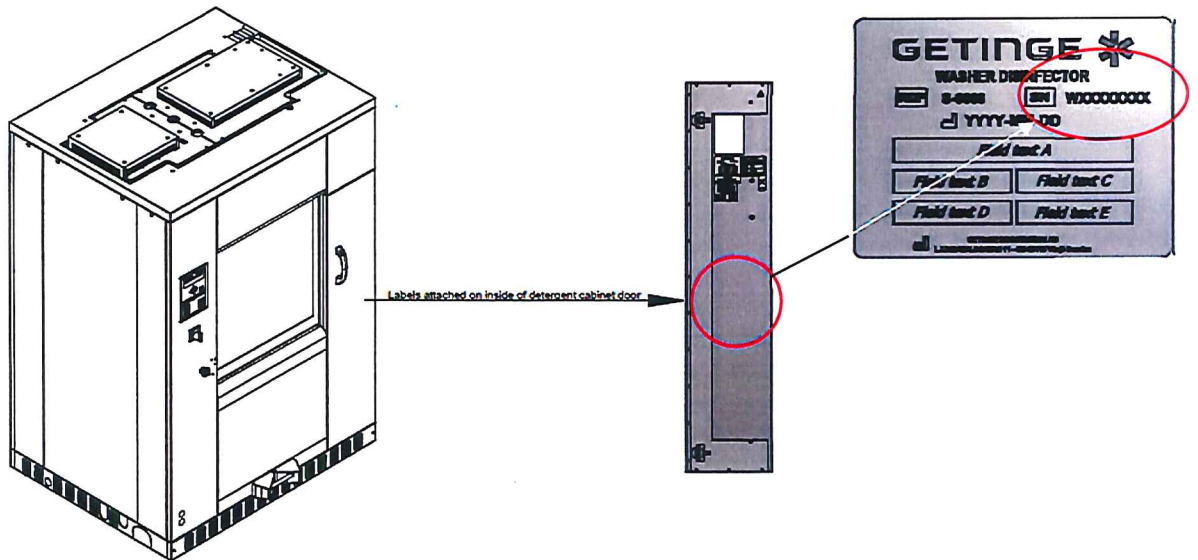

2. Preverite, ali se pod površino naprave pojavlja puščanje.
3. Če naprava pušča, pokličite serviserja! Napravo lahko še naprej uporabljate, a priporočamo previdnost.
4. Izpolnite in podpišite priložen obrazec in ga vrnite v lokalno pisarno podjetja Getinge oz. pooblaščenemu zastopniku.

TERENSKO VARNOSTNO OBVESTILO, GETINGE SERIJE 88

Pošiljanje tega terenskega obvestila:

To varnostno obvestilo o napravi Getinge serije 88 je treba razdeliti tistim osebam v vaši organizaciji, ki morajo biti z njim seznanjene oz. kateri koli organizaciji, kamor so bile omenjene naprave nameščene.

Prosimo, zavedajte se tega obvestila in posledičnega ukrepa, da boste zagotovili učinkovitost korektivnih ukrepov.

V primeru, da se vi kot stranka odločite, da ne boste nadaljevali z obveščanjem podjetja Getinge, ne moremo prevzeti nobene odgovornosti za reševanje problemov v zvezi z varnostjo ali pravnih obveznosti, ki nastanejo zaradi odziva na to obvestilo.

Dodatne informacije in podpora

Globoko obžalujemo te neveselosti, vendar cenimo vaše razumevanje, da želimo s korektivnimi ukrepi zagotoviti pravilno delovanje izdelka. Če imate dodatna vprašanja ali potrebujete pomoč pri izpolnjevanju obrazca, se obrnite na pooblaščenega zastopnika podjetja Getinge.

OBVESTILO STRANKAM

Sklic: GD8980– terensko varnostno obvestilo, Getinge serije 88

V naših evidencah je zavedeno, da je bila naprava Getinge serije 88, navedena v spodnji tabeli, dostavljena na vašo lokacijo. Preverite, ali imate katero od naštetih naprav, ki bi lahko bile prizadete in izpolnite spodnje podatke.

GETINGE ŠT. NAROČILA	Model/izdelek	SERIJSKA ŠT.
0010019468	GETINGE WD88 TURBO	W50036875
0010019468	GETINGE WD88 TURBO	W50036898

Tukaj zapišite skupno število prizadetih naprav, ki se trenutno nahajajo v vašem objektu → 2

Prosimo, preverite spodnja polja:

Prebrali in razumeli smo obvestilo o terenskem korektivnem ukrepu ter smo seznanjeni s potrebnimi ukrepi in jih bomo tudi izvedli.

Prosimo, navedite fizične lokacije prizadetih naprav.

Obvestilo o korektivnem ukrepu na terenu in obvestilo strankam – potrditev s strani stranke

Naziv trenutne ustanove	SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE – centralna setrilizacija		
Kontaktna oseba	Mateja Kugonič, dipl.m.s – vodja odseka OE sterilizacija		
Naslov	Oblakova ulica 5		
Mesto, država, poštna številka	CELJE	3000	SLOVENIJA
Telefonska številka	+386 3 423 32 30	Faks:	
E-mail naslov:	mateja.kugonic@sb-celje.si		

našo napravo Getinge serije 88 smo zavrgli

našo napravo Getinge serije 88 smo prodali/prestavili v drugo ustanovo

Prosimo, navedite nove fizične lokacije prizadetih naprav.

Naziv nove ustanove			
Kontaktna oseba			
Naslov			
Mesto, država, poštna številka			
Telefonska številka		Faks:	
E-mail naslov:			

IZPOLNJEN OBRAZEC VRNITE

MAIL

info@skanteh.si

KONTAKT

Denis Janušič, 041 669 600

Kraj in datum:

Celje 13. 2. 2020

Podpis stranke:

