

## **NUJNO: Obvestilo proizvajalca o varnostnih korektivnih ukrepih** **Škarje HARMONIC™ HD 1000i** **(Posebne serije izdelkov s šiframa HARHD20 in HARHD36)** **— prostovoljni odpoklic (odstranitev) —**

19. julij 2021

Spoštovani nadzorniki operacijskih dvoran, osebje za upravljanje z materiali in vodja kirurgije:

Družba Ethicon je sprožila prostovoljni odpoklic medicinskega pripomočka (odstranitev) določenih serij škarij HARMONIC® HD 1000i. Družba Ethicon je ugotovila redko stanje pri majhnem številu pripomočkov, pri katerem lahko eden od notranjih sestavnih delov počni in se zagozdi za napajalnim gumbom, kar lahko povzroči neprekinjeno delovanje pripomočka. Kirurg lahko težavo z neprekinjenim delovanjem pripomočka med postopkom hitro zazna s pomočjo zvočnih, vizualnih in taktilnih indikatorjev.

### **Možni vpliv:**

V malo verjetnem primeru, da pride do neprekinjenega delovanja, lahko pride do kirurške zamude med iskanjem nadomestnega pripomočka ali pa se za dokončanje postopka uporabi nadomestna metoda. Zamuda ne bi smela vplivati na pričakovani kirurški izid. Če uporabnik ne zazna neprekinjenega delovanja, se lahko med operacijo pojavijo nenamerne toplotne poškodbe tkiva.

Do danes družba Ethicon ni prejela nobenih poročil o neželenih dogodkih, povezanih s težavo, ki je privedla do tega odpoklica. Zdravstveni delavci, ki so bolnike zdravili z uporabo škarij HARMONIC™ HD 1000i, morajo te bolnike pooperativno spremljati na običajen način brez dodatnih ukrepov, saj se ugotovljena težava pojavi med operacijo.

Družba Ethicon je določila osnovni vzrok za to težavo, opredelila zadevne serije ter izvedla korektivne ukrepe za reševanje težave in preprečevanje ponovnega pojava.

O tem prostovoljnem odpoklicu medicinskega pripomočka so bili obveščeni vsi zadevni zdravstveni organi, vključno z lokalnim zdravstvenim organom vaše države.

Iz evidence je razvidno, da ste morda naročili ali prejeli izdelek, ki je predmet tega odpoklica. **PROSIMO VAS, DA TE INFORMACIJE RAZDELITE VSEM ČLANOM OSEBJA V VAŠI USTANOVI, KI UPORABLJAJO ŠKARJE HARMONIC™ HD 1000i.**

Prvi datum distribucije zadevnega izdelka je bil **3. september 2020**.

**VELJA TAKOJ — NE UPORABLJAJTE ALI DISTRIBUIRAJTE PRIZADETIH SERIJ, NAVEDENIH V PRILOGI 1. ZA NADALJNJA NAVODILA GLEJTE POTREBNE UKREPE.**

### **IDENTIFIKACIJA IZDELKA, KI JE PREDMET TEGA ODPOKLICA:**

Izdelek v vaših zalogah, ki je predmet odpoklica, je mogoče identificirati s šifro izdelka in serijo, kot je opisano v **prilogi 1 Priloga 2** vsebuje šifre in serijske številke paketov za postopek, ki vsebujejo škarje HARMONIC™ HD 1000i, ki so predmet tega odpoklica. Za pomoč pri identifikaciji serij izdelkov, ki so predmet tega odpoklica, uporabite **prilogo 3 in prilogo 4**. Vrniti je treba vse neuporabljene škarje HARMONIC™ HD 1000i, ki so predmet tega odpoklica.

### **POTREBNI UKREPI:**

# **NUJNO: Obvestilo proizvajalca o varnostnih korektivnih ukrepih**

## **Škarje HARMONIC™ HD 1000i (Posebne serije izdelkov s šiframa HARHD20 in HARHD36)**

### **— prostovoljni odpoklic (odstranitev) —**

1. Takoj preglejte svoje zaloge, da ugotovite, ali imate izdelek, ki je predmet tega odpoklica, na zalogi ter zanj odredite karanteno.
2. Odstranite izdelek, ki je predmet tega odpoklica, in o tem obvestite ustrezno operacijsko dvorano, osebje za upravljanje z materiali ali kogar koli drugega v vaši ustanovi, ki ga je treba obvestiti.
3. Če je bil kateri koli izdelek, ki je predmet tega odpoklica, posredovan drugi ustanovi, se obrnite na to ustanovo in uredite vračilo izdelka. Prosimo, da v komunikacijo vključite to obvestilo o odpoklicu.
4. Izpolnite obrazec za poslovni odgovor (BRF) (priloga 5), ki potrjuje prejem tega obvestila in ga v roku treh (3) delovnih dni pošljite na elektronski naslov [RA-JNJRO-JJMSEEFASS@ITS.JNJ.com](mailto:RA-JNJRO-JJMSEEFASS@ITS.JNJ.com). **Prosimo, da BRF predložite tudi, če izdelka, ki je predmet tega odpoklica, nimate na zalogi.**
5. Stranke morajo nemudoma vrniti neuporabljene zadevne škarje HARMONIC™ HD 1000i, ki so predmet tega odpoklica in ki so trenutno na zalogi. Za povračilo vrednosti morajo stranke izdelek, ki je predmet tega odpoklica, vrniti najkasneje do 31. januarja 2022. Vrednost vsakega izdelka, ki ni predmet tega odpoklica, in vsakega izdelka, vrnjenega po določenem datumu, ne bo povrnjena.
6. To obvestilo objavite na vidnem mestu, dokler niso vsi izdelki, ki so predmet tega odpoklica, vrnjeni družbi Johnson & Johnson. Med obdelavo vašega vračila kopijo tega obvestila hranite skupaj z izdelkom, ki je predmet tega odpoklica, in kopijo shranite za lastno evidenco.

V družbi Ethicon svoje stranke in njihove bolnike obravnavamo prednostno, kar upoštevamo tudi pri varni in učinkoviti rabi naših izdelkov. Zavedamo se, da lahko odpoklic tega izdelka moti delovanje vaše ustanove, in se opravičujemo za morebitne nevšečnosti, ki jih lahko ta odpoklic povzroča.

Če imate dodatna vprašanja v zvezi s tem prostovoljnim odpoklicem izdelka ali potrebujete pomoč pri vračilu izdelka, se obrnite na prodajnega zastopnika.

Kot pri vseh medicinskih pripomočkih morate o neželenih učinkih ali težavah v zvezi s kakovostjo, ki se pojavijo pri uporabi tega izdelka, obvestiti prodajnega zastopnika, neposredno družbo Ethicon ali nacionalni zdravstveni organ. Če imate dodatna vprašanja v zvezi s tem obvestilom ali če potrebujete dodatna pojasnila, se obrnite na lokalnega prodajnega zastopnika.

### **Priloge:**

Priloga 1: Šifre in serije zadevnih izdelkov

Priloga 2: Šifre in serije zadevnih paketov za poseg, ki vsebujejo škarje HARMONIC™ HD 1000i

Priloga 3: Orodje za identifikacijo izdelka

Priloga 4: Orodje za identifikacijo paketa za poseg

Priloga 5: Obrazec za poslovni odgovor (BRF)

# NUJNO: Obvestilo proizvajalca o varnostnih korektivnih ukrepih

Škarje HARMONIC™ HD 1000i  
(Posebne serije izdelkov s šiframa HARHD20 in HARHD36)

— prostovoljni odpoklic (odstranitev) —

## Priloga 1: Šifre in serije zadevnih izdelkov

IME IZDELKA	ŠIFRA IZDELKA	IZDELEK SERIJE		GTIN/PRIMARNA IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PRIPOMOČKA
Škarje HARMONIC™ HD 1000i (dolžina 20 cm)	HARHD20	U95126	U9571N	10705036015048
		U9526Z	U95A80	
		U9543P	U95T0X	
		U9550G	U95U1R	
Škarje HARMONIC™ HD 1000i (dolžina 36 cm)	HARHD36	U94Y9V	U95814	10705036015055
		U94Y9W	U95815	
		U94Z49	U95856	
		U94Z98	U9587D	
		U9503G	U95A9X	
		U9507E	U95C2A	
		U95127	U95D4T	
		U9512D	U95E1U	
		U9516E	U95E29	
		U9518D	U95E6F	
		U9521Z	U95E72	
		U9530P	U95F07	
		U95366	U95F2T	
		U95427	U95F6N	
		U9543R	U95F8W	
		U9548R	U95K4D	
		U95524	U95L0A	
		U95525	U95R4F	
		U95526	U95R7C	
		U9554U	U95T2Z	
U95566	U95T90			
U95599	U95U6A			
U9564G	U95Y7G			
U9569W	U95Z67			
U9571P	U9523L			
U95754	U9530X			

# NUJNO: Obvestilo proizvajalca o varnostnih korektivnih ukrepih

Škarje HARMONIC™ HD 1000i  
(Posebne serije izdelkov s šiframa HARHD20 in HARHD36)

— prostovoljni odpoklic (odstranitev) —

Priloga 2: Šifre in serije zadevnih paketov za poseg, ki vsebujejo škarje HARMONIC™ HD 1000i

ŠIFRA PAKETA ZA POSTOPEK	SERIJA PAKETA ZA POSTOPEK	ŠIFRA PAKETA ZA POSTOPEK	SERIJA PAKETA ZA POSTOPEK	ŠIFRA PAKETA ZA POSTOPEK	SERIJA PAKETA ZA POSTOPEK
LCOL142	10221875	LGBP512P	10224497	LGBP721	10237790
LCOL142	10221866	LGBP512P	10224502	LGBP730	10232122
LCOL142	10221869	LGBP512P	10224504	LGBP730	10232126
LCOL142	10221871	LGBP512P	10224506	LGBP730	10232133
LCOL142	10221877	LGBP512P	10224963	LGBP730	10232137
LCOL142	10221914	LGBP512P	10224964	LGBP730	10237187
LCOL142	10234617	LGBP512P	10224966	LGBP730	10237190
LCOL142	10234619	LGBP512P	10224969	LGBP730	10237192
LCOL142	10234622	LGBP512P	10225024	LGBP730	10237194
LCOL142	10234626	LGBP512P	10225025	LGBP730	10237196
LCOL157	10221568	LGBP512P	10225029	LGBP730	10237198
LCOL157	10221572	LGBP512P	10225046	LGBP730	10237199
LCOL157	10221574	LGBP512P	10225051	LGBP730	10237202
LCOL157	10221753	LGBP512P	10225053	LGBP730	10240257
LCOL157	10221756	LGBP512P	10227918	LGBP730	10240263
LCOL157	10221759	LGBP512P	10227920	LGBP754	10231677
LCOL157	10221771	LGBP512P	10227924	LGBP754	10231702
LCOL157	10221773	LGBP512P	10227927	LGBP754	10231714
LCOL157	10221775	LGBP512P	10235418	LGBP754	10231727
LCOL157	10224303	LGBP512P	10235419	LGBP741	10237255
LCOL157	10224316	LGBP512P	10235420	LGBP741	10236770
LCOL157	10224321	LGBP512P	10235421	LGBP741	10236774
LCOL157	10224325	LGBP512P	10239420	LGBP741	10237250
LCOL157	10224329	LGBP512P	10239428	LGBP741	10237260
LCOL157	10224332	LGBP512P	10239430	LGBP741	10237278
LCOL157	10237546	LGBP512P	10239433	LGBP741	10240386
LCOL157	10237551	LGBP513P	10221521	LGBP741	10240392
LCOL157	10237559	LGBP513P	10221524	LGBP741	10240400
LCOL172	10221193	LGBP513P	10221525	LGBP741	10240403
LCOL172	10221199	LGBP513P	10221527	LHEP001	10232323
LCOL208	10221656	LGBP513P	10239422	LHEP001	10232328
LCOL208	10221647	LGBP513P	10239423	LHEP001	10232346
LCOL208	10221652	LGBP620	10232303	LHEP001	10232354
LCOL208	10221654	LGBP620	10232288	LHEP001	10232356
LCOL208	10224318	LGBP620	10232293	LHEP001	10232357
LCOL208	10224320	LGBP620	10232298	LHEP001	10232358
LCOL208	10224322	LGBP638	10222627	LHEP001	10232360
LCOL208	10224323	LGBP638	10222634	LSR329B	10223024
LCOL208	10236857	LGBP638	10222652	LSR329B	10223026
LCOL208	10236859	LGBP638	10222660	LSR329B	10223029
LCOL208	10236865	LGBP638	10229804	LSR329B	10223034
LCOL221B	10221587	LGBP638	10229807	LSR329B	10224456
LCOL221B	10221584	LGBP638	10229810	LSR329B	10224457

# NUJNO: Obvestilo proizvajalca o varnostnih korektivnih ukrepih

Škarje HARMONIC™ HD 1000i

(Posebne serije izdelkov s šiframa HARHD20 in HARHD36)

— prostovoljni odpoklic (odstranitev) —

ŠIFRA PAKETA ZA POSTOPEK	SERIJA PAKETA ZA POSTOPEK	ŠIFRA PAKETA ZA POSTOPEK	SERIJA PAKETA ZA POSTOPEK	ŠIFRA PAKETA ZA POSTOPEK	SERIJA PAKETA ZA POSTOPEK
LCOL221B	10221585	LGBP641	10222916	LSR329B	10224458
LCOL221B	10221586	LGBP641	10222917	LSR329B	10224460
LCOL221B	10221589	LGBP641	10222919	LSR329B	10232269
LCOL221B	10221590	LGBP641	10222920	LSR329B	10232274
LCOL221B	10221591	LGBP641	10222922	LSR329B	10232278
LCOL221B	10221592	LGBP641	10222923	LSR329B	10232283
LCOL221B	10221593	LGBP641	10222925	LSR329B	10241754
LCOL221B	10221595	LGBP641	10222927	LSR329B	10241765
LCOL221B	10221597	LGBP641	10222928	LSR360	10231589
LCOL221B	10221601	LGBP641	10222929	LSR360	10231573
LCOL231	10232545	LGBP641	10222932	LSR360	10231575
LCOL231	10232528	LGBP641	10222935	LSR360	10231581
LCOL231	10232540	LGBP641	10222941	LSR363B	10223376
LCOL231	10232544	LGBP641	10222944	LSR363B	10223348
LCOL231	10232551	LGBP641	10222977	LSR363B	10223356
LCOL231	10232555	LGBP641	10222980	LSR363B	10223371
LCOL231	10232556	LGBP641	10222984	LSR363B	10223908
LCOL231	10232558	LGBP641	10222986	LSR365	10241794
LCOL231	10232561	LGBP641	10234117	LSR365	10241766
LCOL231	10232566	LGBP641	10234121	LSR365	10241773
LCOL231	10232568	LGBP641	10234125	LSR365	10241779
LCOL231	10232569	LGBP641	10234129	LSR424	10224064
LCOL231	10232574	LGBP641	10234131	LSR424	10224067
LCOL231	10232578	LGBP641	10234138	LSR424	10224077
LCOL231	10232580	LGBP642	10235436	LSR424	10224086
LCOL231	10232586	LGBP642	10235441	LSR457	10223897
LCOL231	10232638	LGBP651	10208865	LSR457	10223891
LCOL231	10232647	LGBP651	10208873	LSR457	10223895
LCOL231	10232651	LGBP664	10210093	LSR457	10223896
LCOL231	10232657	LGBP664	10210102	LSR457	10223898
LCOL242	10222251	LGBP664	10210110	LSR457	10223899
LCOL242	10222200	LGBP664	10210117	LSR467B	10230055
LCOL242	10222204	LGBP664	10221519	LSR467B	10230056
LCOL242	10222246	LGBP664	10221522	LSR467B	10230058
LCOL242	10222258	LGBP664	10221526	VATS69	10227916
LCOL242	10222262	LGBP664	10221529	VATS69	10227923
LESOP7	10222586	LGBP664	10224333	VATS69	10237719
LESOP7	10222588	LGBP664	10224334	VATS69	10237720
LESOP7	10222596	LGBP664	10224335	VATS69	10237724
LESOP7	10222601	LGBP664	10224336	VATS69	10237725
LGBP512P	10208867	LGBP664	10234749	VATS69	10237726
LGBP512P	10208880	LGBP664	10234753	VATS69	10237727
LGBP512P	10208901	LGBP718	10224038	VATS85	10223996
LGBP512P	10208906	LGBP718	10224014	VATS85	10223977
LGBP512P	10220973	LGBP718	10224023	VATS85	10223985
LGBP512P	10220977	LGBP718	10224028	VATS85	10223990

# **NUJNO: Obvestilo proizvajalca o varnostnih korektivnih ukrepih**

**Škarje HARMONIC™ HD 1000i**

**(Posebne serije izdelkov s šiframa HARHD20 in HARHD36)**

**— prostovoljni odpoklic (odstranitev) —**

<b>ŠIFRA PAKETA ZA POSTOPEK</b>	<b>SERIJA PAKETA ZA POSTOPEK</b>	<b>ŠIFRA PAKETA ZA POSTOPEK</b>	<b>SERIJA PAKETA ZA POSTOPEK</b>	<b>ŠIFRA PAKETA ZA POSTOPEK</b>	<b>SERIJA PAKETA ZA POSTOPEK</b>
LGBP512P	10220982	LGBP721	10237770		
LGBP512P	10220985	LGBP721	10237774		



# NUJNO: Obvestilo proizvajalca o varnostnih korektivnih ukrepih

Škarje HARMONIC™ HD 1000i  
(Posebne serije izdelkov s šiframa HARHD20 in HARHD36)

— prostovoljni odpoklic (odstranitev) —

## Priloga 3: Orodje za identifikacijo izdelkov za škarje HARMONIC™ HD 1000i

Za identifikacijo lokacije šifre izdelka, GTIN in serijske številke škarij HARMONIC™ HD 1000i, ki so predmet tega odpoklica, na označbi, ki se nahaja na embalaži, upoštevajte spodnje.


### Škatla pripomočka – sprednja stran (reprezentativni vzorec)



### Škatla pripomočka – zadnja stran (reprezentativni vzorec)



### Paket z zaprtim pripomočkom Tyvek\* (reprezentativni vzorec)

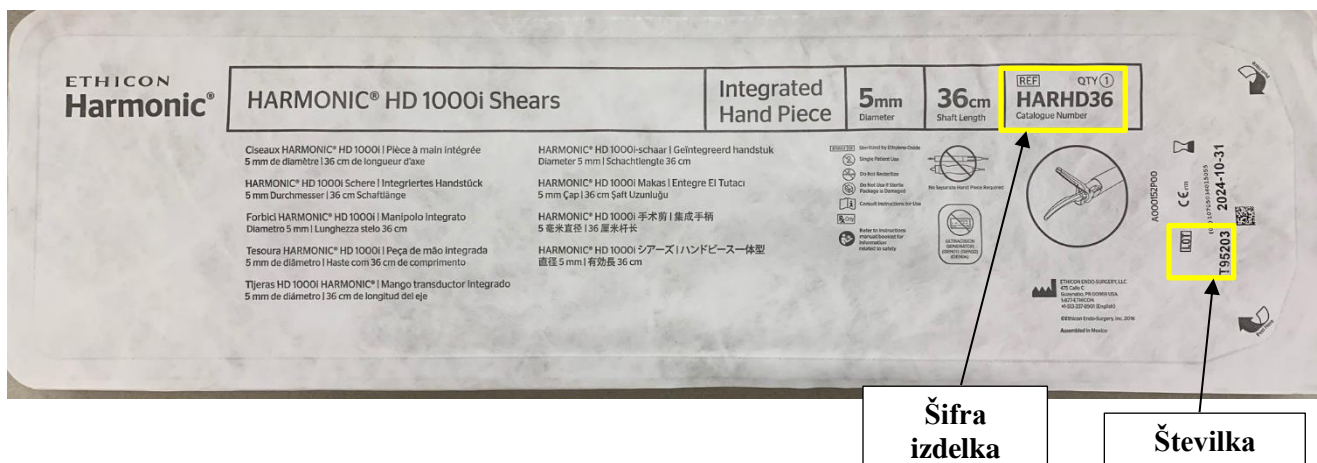

\*Tyvek je blagovna znamka družbe E.I. du Pont de Nemours and Company ali njenih podružnic

# NUJNO: Obvestilo proizvajalca o varnostnih korektivnih ukrepih

## Škarje HARMONIC™ HD 1000i

(Posebne serije izdelkov s šiframa HARHD20 in HARHD36)

— prostovoljni odpoklic (odstranitev) —

### Priloga 4: Orodje za identifikacijo paketov za poseg




To orodje bo strankam pomagalo najti lokacijo kode izdelka in serijsko številko paketov za poseg, ki so predmet tega odpoklica, in sicer z uporabo označb na embalaži paketa za poseg.


### Škatla paketa za poseg (reprezentativni vzorec)

Šifra izdelka

REF LC0L176 LAPAROSCOPIC COLON PACK

KIT POUR COLON LAPAROSCOPIQUE      SET ANTIPODOKOLNIH EPIMIBADJE PAKETIŠE ENTERIČNI  
 BEHANDLUNGSSATZ FÜR LAPAROSKOPISCHE KOLON-OPERATION      ASAMBLAJÓN DE PRODUCTO PARA COLON LAPAROSCÓPICO  
 KIT PER LAPAROSCOPICAL COLON      COLONKITO PARA COLON LAPAROSCÓPICO  
 PAKET VOOR LAPAROSKOPISCHE COLONPROCEDURES

QTY	REF		
1	PSEE60A CE 033 MD		<b>ECHOLON FLEX™ Powered Plus Articulating Endoscopic Linear Cutter with Gripping Surface Technology   30mm Staple Line   30mm Shank Length</b> Agrifonece lineare articulabile endoscopice Echelon FLEX™ Plus a motorizaciji vstreljice s površino tehnologije de surface agrippante   Longueur des lignes d'agrafes 30mm   Longueur de la tige 300mm Powered Plus articulating endoscopic linear cutter   Endoscopic Stapling Technology   30mm Staple Line   30mm Shank Length Substancia lineare articulabile endoscopice Echelon FLEX™ Plus a motorizaciji vstreljice s površino tehnologije de surface agrippante   Longueur des lignes d'agrafes 30mm   Longueur de la tige 300mm Artificios lineares articulables endoscópicos Echelon FLEX™ Plus con tecnología de superficie de agarre   Línea de grapado 30mm   Longitud del cuerpo 300mm Corchetes lineares articuláveis endoscópicos Echelon FLEX™ Plus com tecnologia de superfície de aderência   Linha de grampo de 30mm   Comprimento do eixo de 300mm
1	CDH29P CE 033 MD		<b>ECHOLON CIRCULAR™ Powered Stapler with Gripping Surface Technology   3D Stapling Technology   28mm Diameter</b> Agrifonece a motorizaciji vstreljice s površino tehnologije de surface agrippante   Technologie d'agrafes 3D   Diamètre 28mm Powered Stapler   3D Stapling Technology   3D Stapling Technology   28mm Diameter Substancia lineare articulabile endoscopice Echelon FLEX™ Plus a motorizaciji vstreljice s površino tehnologije de surface agrippante   Longueur des lignes d'agrafes 30mm   Longueur de la tige 300mm Artificios lineares articulables endoscópicos Echelon FLEX™ Plus con tecnología de superficie de agarre   Línea de grapado 30mm   Longitud del cuerpo 300mm Corchetes lineares articuláveis endoscópicos Echelon FLEX™ Plus com tecnologia de superfície de aderência   Linha de grampo de 30mm   Comprimento do eixo de 300mm
1	GST60D CE 033 MD		<b>ECHOLON ENDOPATH™ Endoscopic Linear Cutter Retractor with Gripping Surface Technology   30mm Staple Line Length   3.8mm Open Staple Height   4 Rows   Guid</b> Agrifonece lineare articulabile endoscopice Echelon FLEX™ Plus a motorizaciji vstreljice s površino tehnologije de surface agrippante   Longueur des lignes d'agrafes 30mm   Hauteur des lignes d'agrafes ouverte 3,8mm   4 rangées   Guid Powered Plus articulating endoscopic linear cutter   Endoscopic Stapling Technology   30mm Staple Line Length   3.8mm Open Staple Height   4 Rows   Guid Substancia lineare articulabile endoscopice Echelon FLEX™ Plus a motorizaciji vstreljice s površino tehnologije de surface agrippante   Longueur des lignes d'agrafes 30mm   Hauteur des lignes d'agrafes ouverte 3,8mm   4 rangées   Guid Artificios lineares articulables endoscópicos Echelon FLEX™ Plus con tecnología de superficie de agarre   Línea de grapado 30mm   Altura de grapo abierta 3,8mm   4 filas   Guiado Corchetes lineares articuláveis endoscópicos Echelon FLEX™ Plus com tecnologia de superfície de aderência   Comprimento da linha de grampo de 30mm   Altura de grampo aberta de 3,8mm   4 fileiras   Guia



LABEL:COL176170

Šifra izdelka

LC0L176

10241542

Številka

Procedure Pack Producer:  
 Johnson & Johnson Medical GmbH  
 Robert-Koch-Straße 1  
 D-22851 Norderstedt, Germany

WO: 499989  
 2023-07-31    2021-05-25  
 (17) 207733 (10) 104134

ETHICON

CD-10081973 / LC0L176-LA7-03



# NUJNO: Obvestilo proizvajalca o varnostnih korektivnih ukrepih

Škarje HARMONIC™ HD 1000i  
(Posebne serije izdelkov s šiframa HARHD20 in HARHD36)  
— prostovoljni odpoklic (odstranitev) —

**Priloga 5:** Obrazec za poslovni odgovor

## Obrazec za poslovni odgovor (BRF)

Prosimo vas za pravočasen odgovor na to obvestilo o preklicu. Prosimo, izpolnite ta obrazec in ga vrnite podjetju Johnson & Johnson na [RA-JNJRO-JJMSEEFASS@ITS.JNJ.com](mailto:RA-JNJRO-JJMSEEFASS@ITS.JNJ.com) v 3 delovnih dneh, tudi če nimate izdelka, za katerega velja ta odpoklic.

Če imate izdelek, ki je predmet tega odpoklica, prosimo, da fotokopirate izpolnjen obrazec za poslovni odgovor in ga priložite odpoklicanim izdelkom, ki jih vračate. Zahvaljujemo se za vaše sodelovanje.

Naziv stranke:	Naslov stranke:
Natisnjeno ime osebe, ki izpolnjuje obrazec za poslovni odgovor:	Telefonska številka:
Številka naročila: (številka, uporabljena pri naročanju izdelka J&J)	Datum:
Naslov za dostavo nadomestnega izdelka (če se razlikuje od zgoraj navedenega) ali referenčna pošta za nadomestno pošiljko:	
Podpis*:	
<small>*S svojim podpisom potrjujete prejem in razumevanje tega obvestila</small>	
Vaši komentarji so dobrodošli.	

**Popis izdelkov** — označite eno od možnosti

- Na zalogi nimamo **NOBENEGA** izdelka, ki je predmet tega odpoklica (odstranitev).
- Na zalogi Imamo izdelek, ki je predmet tega odpoklica (odstranitev) in vračamo naslednje izdelke:

ŠIFRA IZDELKA	SERIJSKA ŠTEVILKA	KOLIČINA ODPOKLICANIH IZDELKOV (KI SE VRAČAJO)