



Priloga A (Postopek preverjanja prisotnosti zraka v cevkah setov za črpalke za enteralno hranjenje Kangaroo)

Da preverite, ali je v cevke seta za hranjenje vstopil zrak (glejte primer spodaj), izvedite spodaj opisani postopek.

- Ko namestite in pripravite set za hranjenje, pritisnite možnost "Run" (Zaženi) na črpalki.
- Po 30 sekundah pregledajte, ali so v cevki med črpalko in pacientom vidni prostorčki z zrakom, ki se premikajo po cevki.
- Nič nenavadnega ni in ne predstavlja posebne težave, če v cevki za hranjenje opazite majhne količine zraka (v dolžini cevke približno 1,3 cm [1/2 palca]), potem ko črpalka preverja morebitne blokade v cevki.
- **Ne uporabljajte seta za hranjenje**, če opazite enoten prostor z zrakom, ki meri **več kot 2,5 cm (1 palec)** dolžine cevke.
- **Ne uporabljajte seta za hranjenje**, če opazite več zračnih mehurčkov, ki skupaj merijo **več kot 2,5 cm (1 palec)** dolžine cevke.

OPOMBA:

Izkazalo se je, da je pojav zraka v cevki nestalen pojav in ni bil opažen v vseh serijah izdelkov. Če pojav odkrijete pri enem setu za hranjenje, to ne pomeni, da je okrnjena kakovost celotne serije izdelkov.



*To je samo primer pojava in zrak v cevki lahko ni tako izrazito opazen kot je prikazano na sliki.