


KRATKI VODNIK ZA BOLNIKE

POLNILNIK INTELLIS™ MODELA 97755

SMERNICE ZA VZDRŽEVANJE IN NEGO

Vsadni nevrostimulator Medtronic morate za zagotavljanje neprekinjene terapije polniti. S spodnjimi smernicami boste lažje vzdrževali in skrbeli za svojo opremo. Z njo ravnajte skrbno in previdno. Preglejte in preberite dokumentacijo za krmilnik in polnilnik, ki je dobavljena s pripomočkom in v kateri so dodatna navodila, previdnostni ukrepi in načini za stik z družbo Medtronic, če bo to potrebno.

PRIKAZ RAZLIČNIH DELOV POLNILNIKA

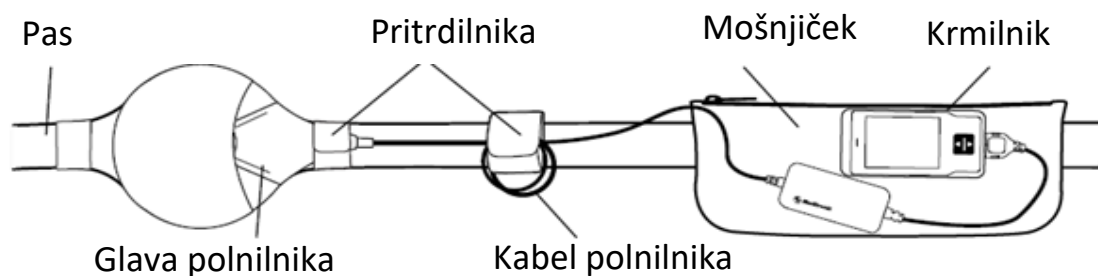

UPOŠTEVAJTE

- Med polnjenjem vsadka uporabljajte pas. Zasnovan je za shranjevanje in zaščito polnilnika in kabla.
- Če pas ni na voljo, si med kožo in polnilnik namestite zračno blago (kot je bombažna krpa).
- Če imate občutek, da je polnilnik pretopen, znižajte hitrost polnjenja in si med daljšim polnjenjem vzemite odmore.
- Kabel redno pregledujte in preverjajte, ali so na njem vidne poškodbe.
- Polnilnik hranite zunaj dosega otrok in domačih živali.
- Med polnjenjem preverjajte, ali je koža razdražena ali rdeča.

NI DOVOLJENO

- NE sedite ali ležite na polnilniku oziroma na polnilnik ne pritiskajte preveč.
- NE izpustite iz rok komponent oziroma nanje ne udarjajte ali stopajte.
- NE zvijajte, upogibajte ali navijajte kabla okoli polnilnika.
- NE vlecite ali potegnite za kabel. Ko prilagajate namestitev polnilnika na ustrezno mesto, primite za pas in namestitev prilagodite s pasom.