

Addendum

MOBILNI ENDOSKOP ZA DIHALNE POTI

Model:

MAF-TM
MAF-TM2
MAF-GM
MAF-GM2
MAF-DM2

Opomba: razpoložljivost izdelka je odvisna od države

1. Navodila

V spodnjih razdelkih so navedeni posodobljeni podatki o premeru uvajalnega dela v specifikacijah in previdnostni ukrepi pred uporabo endoskopov z endotrahealno cevjo. Spremembe so povzete v nadaljevanju in so označene s podčrtanim besedilom v naslednjih razdelkih tega dodatka. Drugi deli navodil za uporabo niso spremenjeni.

1. Previdnostni ukrepi pred uporabo endoskopov z endotrahealno cevjo so posodobljeni v poglavju »Pomembne informacije — preberite pred uporabo« v razdelku »Opozorila in previdnostni ukrepi«.
2. V specifikacije je dodan največji premer cevke za vstavljanje v 2. poglavju – »2.2 Specifikacije«.

2. ***Previdnostni ukrepi v poglavju »Pomembne informacije — preberite pred uporabo«***

Previdnostni ukrepi

- Preden vstavite mobilni endoskop za dihalne poti z endotrahealno cevjo v bolnika, potisnite cevko po celotni dolžini uvajalnega dela mobilnega endoskopa za dihalne poti, da se prepričate, da je uvajalni del mobilnega endoskopa mogoče uvesti v endotrahealno cev brez zatikanja. Če ga ni mogoče vstaviti brez zatikanja, je morda poškodovan prekrivni material upogibnega dela mobilnega endoskopa za dihalne poti ali zunanja površina uvajalnega dela. Če uporabljate lubrikant, opravite zgoraj opisano preverjanje preden nanasete lubrikant.

3. »Specifikacije« v poglavju 2.2 Specifikacije

Št. modela	Specifikacije		
	(a) Zunanji premer distalnega konca (mm)	(b) Zunanji premer uvajalne cevke (mm)	(c) Največji zunanji premer uvajalne cevke (mm)
MAF-TM	5,1	5,2	<u>5,95</u>
MAF-TM2	5,1	5,2	<u>5,95</u>
MAF-GM	3,9	4,1	<u>4,5</u>
MAF-GM2	3,9	4,1	<u>4,5</u>
MAF-DM2	3,1	3,1	<u>3,4</u>

Datum izdaje 28. 6. 2023
FY24-OMSC-07-Addendum-
MAF

©2023 OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. Vse pravice pridržane.