

Addendum

FIBERSKOP ZA TRAHEALNO INTUBACIJO, VIDEOSKOP ZA TRAHEALNO INTUBACIJO

Model:

LF-TP
LF-DP
LF-GP
LF-V
LF-P

Opomba: razpoložljivost izdelka je odvisna od države

1. Navodila

V spodnjih razdelkih so navedeni posodobljeni podatki o premeru uvajalnega dela v specifikacijah in previdnostni ukrepi pred uporabo endoskopov z endotrahealno cevjo. Spremembe so povzete v nadaljevanju in so označene s podčrtanim besedilom v naslednjih razdelkih tega dodatka. Drugi deli navodil za uporabo niso spremenjeni.

1. Previdnostni ukrepi pred uporabo endoskopov z endotrahealno cevjo so posodobljeni v poglavju »Pomembne informacije — preberite pred uporabo« v razdelku »Opozorila in previdnostni ukrepi«.
2. V specifikacije je dodan največji premer cevke za vstavljanje v 2. poglavju – »2.2 Specifikacije«.

2. ***Previdnostni ukrepi v poglavju »Pomembne informacije — preberite pred uporabo«***

Previdnostni ukrepi

- Preden vstavite endoskop za trahealno intubacijo z endotrahealno cevjo v bolnika, potisnite cevko po celotni dolžini uvajalnega dela endoskopa za trahealno intubacijo, da se prepričate, da je uvajalni del endoskopa za trahealno intubacijo mogoče uvesti v endotrahealno cev brez zatikanja. Če ga ni mogoče vstaviti brez zatikanja, je morda poškodovan prekrivni material upogibnega dela endoskopa za trahealno intubacijo ali zunanja površina uvajalnega dela. Če uporabljate lubrikant, opravite zgoraj opisano preverjanje, preden nanesete lubrikant.

3. »Specifikacije« v poglavju 2.2 Specifikacije

Št. modela	Specifikacije		
	(a) Zunanji premer distalnega konca (mm)	(b) Zunanji premer uvajalne cevke (mm)	<u>(c) Največji zunanji premer uvajalne cevke (mm)</u>
LF-TP	5,1	5,2	<u>5,95</u>
LF-DP	3,1	3,1	<u>3,4</u>
LF-GP	3,8	4,1	<u>4,5</u>
LF-V	3,8	4,1	<u>4,5</u>
LF-P	1,8	2,2	<u>2,4</u>