

Datum: 17.11.2023

Zadeva: NUJNO VARNOSTNO OBVESTILO

Spoštovani kupec,

Finski proizvajalec **ACTIM** sporoča, da je nedavno testiranje motenj pri proizvodni **Actim® PROM** pokazalo, da lahko prisotnost lubrikantov v vaginalnem vzorcu vpliva na rezultat testa PROM.

Ime proizvoda: Actim® PROM
Kataloška številka: 30832ETAC, 30831ETAC, 31930ETAC
Datum izdaje varnostnega obvestila: 13. november 2023

Tveganje za napačen rezultat se lahko pojavi, če se med odvzemom vzorca s spekulom uporablja kirurško mazivo, lubrikant. Poleg tega lahko prisotnost osebnega lubrikanta v vagini med odvzemom vzorca vpliva na rezultat testa.

Zaradi previdnosti vas prosimo, da med odvzemom vzorca ne uporabljate kirurških lubrikantov. Prav tako vas prosimo, da zagotovite, da vaginalni vzorec ne vsebuje ostankov lubrikanta zaradi nedavne osebne uporabe bolnika.

Navodila za uporabo bodo posodobljena in bodo vključevala testirana maziva oz. lubrikante s koncentracijami, ki povzročajo tveganje za motnje.

To obvestilo je treba nemudoma posredovati vsem tistim znotraj vaše organizacije, ki morajo biti z njim seznanjeni in vsem končnim uporabnikom testa Actim Prom (npr. ginekologom in porodničarjem).

Če imate kakršna koli vprašanja ali skrbi, nam pišite na barbara.zajec@maritim.si oz. se obrnite na support@actimtest.com

S spoštovanjem,

Barbara Zajec
Strokovna sodelavka

Priponka:

- Actim PROM FSN EU - kupcem 13.11.2023

Poslano:

- Naslovniku po e-pošti