

Drägerwerk AG & Co. KGaA, 23542 Lübeck

Vsem strankam polnilne podlage Alcotest 7000 (številka dela 3700420)

Junij 2024

Nujno varnostno obvestilo! Prenehanje uporabe in vrnitev polnilne zibelke Dräger Alcotest 7000 (3700420)



Spoštovani uporabniki,

v okviru stalnega spremljanja kakovosti smo ugotovili, da naša polnilna podstavka za napravo Dräger Alcotest 7000 / 7000 med ne izpolnjuje naših zahtev.

Prosimo, da s takojšnjim učinkom prenehate uporabljati polnilno stojalo za napravo Dräger Alcotest 7000 / 7000 med in namesto tega polnite napravo Dräger Alcotest 7000 / 7000 med izključno tako, da jo neposredno povežete s kablom USB-C, ki je vključen v obseg dobave. Napravo Dräger Alcotest 7000 lahko polnite s priključitvijo na napajalnik (npr. 3701090) ali s priključitvijo na računalnik. Napravo Dräger Alcotest 7000 med je dovoljeno polniti samo z napajalnikom 3701090, ki je vključen v obseg dobave.

Prav tako bomo takoj prenehali prodajati polnilno stojalo za polnjenje naprave Dräger Alcotest 7000.

V zadnjih tednih so se pojavili posamezni primeri polnilnih stojal, ki so povzročili opekline zaradi upognjenih kontaktov v vratih USB-C na napravi Dräger Alcotest 7000 / 7000 med naprav in/ali samih polnilnih podstavkov. Zaradi varnostnih razlogov bomo polnilna stojala umaknili s trga.

Prosimo, da polnilno stojalo Dräger Alcotest 7000 ustrezno odstranite ali nam ga pošljete nazaj. Na zahtevo vam bomo seveda vrnili kupnino za polnilno podstavek.

Namesto vračila kupnine vam lahko v zameno za polnilno stojalo Dräger Alcotest 7000 ponudimo tudi brezplačne ustnike.

Razlikovati je treba med nemedicinsko in medicinsko napravo Dräger Alcotest 7000:

Ponudba za nemedicinski pripomoček (Alcotest 7000; SNR 3700420 in 3700398):

- 250 ustnikov z zaporo za ponovno dihanje z nepovratnim ventilom za vrnjeno polnilno stojalo
- številka dela 6811060

Ponudba za medicinski pripomoček (Alcotest 7000 med; SNR 3700399):

- 200 ustnikov Alcomed s protipovratnim ventilom za vrnjeno polnilno stojalo
- Številka dela 3705618

V zvezi s tem vas bo kontaktirala kontaktna oseba podjetja Dräger.

Obžalujemo nevšečnosti, ki jih je povzročil ta ukrep, in se vam zahvaljujemo za razumevanje in sodelovanje.

S prijaznim pozdravom.



Robert Betzinger
Product Manager Alcotest Screener
Application Field Alcotest & DrugTest