

NAVODILO

Navodila za fotografsko dokumentacijo

Revizija	001	Različica B
Datum	23.07.2026	06.08.2026
Avtor		

Namen

Fotografska dokumentacija bo omogočila oceno stanja izdelka. V nekaterih primerih lahko fotografije predstavljajo tudi del dokumentacije, ki se uporablja med preiskavo in tehnično analizo.

Da zagotovite ustrezno oceno, fotografije posnemite v skladu s spodnjimi smernicami.

Smernice za fotografiranje

Fotografije posnemite na naslednji način:

- 1 fotografija celotnega izdelka
- 1 fotografija tipske ploščice
- 2 fotografiji vsakega kolesca, skupaj 8 fotografij.


Na naslednjih straneh navodil je natančno prikazano, kako posneti vsako fotografijo.

Postopek - Prosim, da v Prilogi B poiščete primer pravilne fotografske dokumentacije


1. Splošni pogled na izdelek – fotografija celotnega izdelka - 1 fotografija (Priloga B, slika 1)
2. Fotografija tipske ploščice, na kateri je vidna serijska številka - 1 fotografija (Priloga B, slika 2)
3. Pritrdilna mesta kolesc - 8 fotografij (Priloga B, slike 3-10)

- Miza ima štiri kolesca. Oštevilčenje kolesc je prikazano na *sliki 4*. Pri poimenovanju ali opisovanju fotografij se po možnosti sklicujte na številke kolesc, prikazane na sliki 3.

- Vsako kolesce je na podnožje pritrjeno z navojnim stebлом, privitim v privarjeno pušo. (Sl. B)

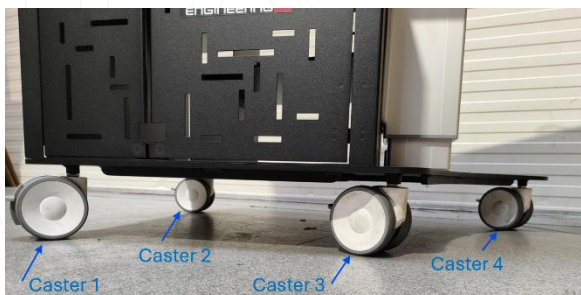

Sl. A. Položaj kolesc.

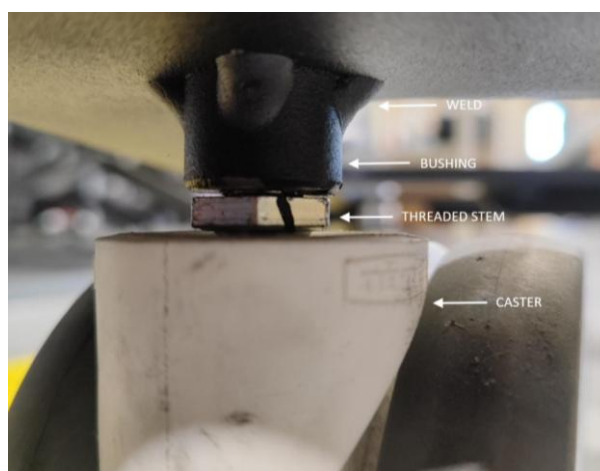

Sl. B. Opis

- Posnemite fotografije zvarov na mestih pritrditve kolesca 1, kolesca 2, kolesca 3 in kolesca 4
- Po možnosti posnemite po dve fotografiji kolesca 1, kolesca 2, kolesca 3 in kolesca 4, tako da so puša in zvari vidni iz različnih zornih kotov (skupaj 8 fotografij).
- Posnemite bližinske fotografije iz več različnih zornih kotov.
- Posnemite fotografije vsakega mesta pritrditve kolesca.
- Če je mogoče, fotoaparati izostrite neposredno na zvar.
- Poskrbite, da so na vsaki fotografiji jasno vidni puša v podnožju, steblo kolesca in zvari.

Priporočila

- Fotografirajte v dobrih svetlobnih pogojih.
- Ne uporabljajte digitalne povečave.
- Fotografij ne urejajte.
- Po potrebi uporabite pregledovalno ogledalo, da zagotovite jasen pogled na zware.

Fotografije prosimo pošljite v formatu JPG ali PNG in jih stisnite v datoteko ZIP/RAR ali pa jih naložite prek OneDrive ali druge storitve za shranjevanje v oblaku, namenjene deljenju velikih datotek.

Kadar je to mogoče, uporabljajte opisna imena datotek, na primer:

01_Product.jpg

02_SN.jpg

03_Caster_1_Weld_1.jpg

04_Caster_1_Weld_2.jpg

Hvala za vaše sodelovanje. Na podlagi priloženih fotografij bomo lahko učinkoviteje ocenili vaše poročilo in določili ustrezne ukrepe. Upoštevajte, da se barve nekaterih sestavnih delov, kot so kolesca ali mizne plošče, lahko razlikujejo od tistih, prikazanih na primerih.

Priloga A

Spodaj so prikazani primeri **neustreznih** fotografij.



Sl. A.1. Zvari in steblo kolesca niso vidni.



Sl. A.2. Slika je neostra


Priloga B**Primer ustrezne fotografske dokumentacije**

Naslednje fotografije so bile posnete v skladu z navodili v priročniku:

- 1 fotografija celotnega izdelka
- 1 fotografija tipske ploščice
- 2 fotografiji vsakega kolesca, skupaj 8 fotografij.



Sl. 1. Splošni pogled na izdelek

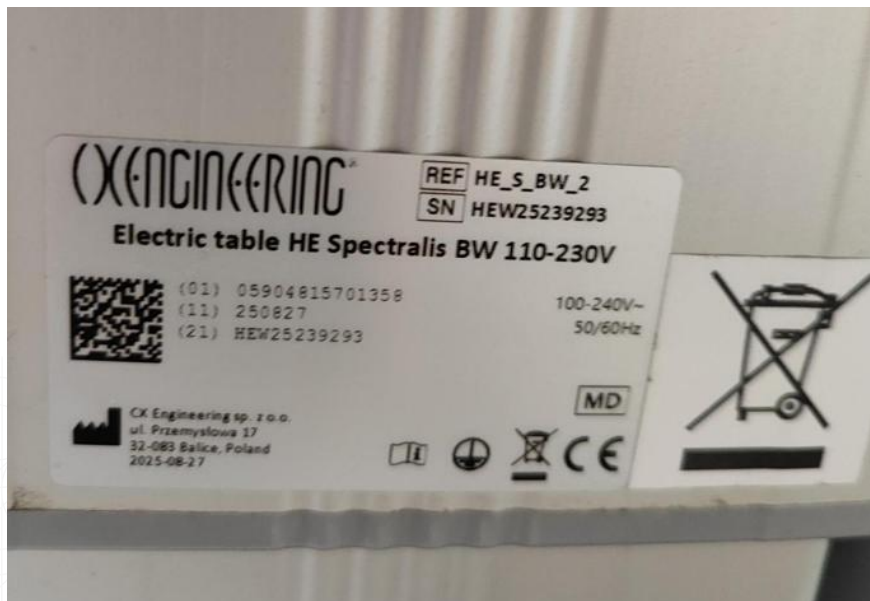


Sl. 2. Tipska ploščica mize





Sl. 3, 4. Kolesce 1



Sl. 5, 6. Kolesce 2

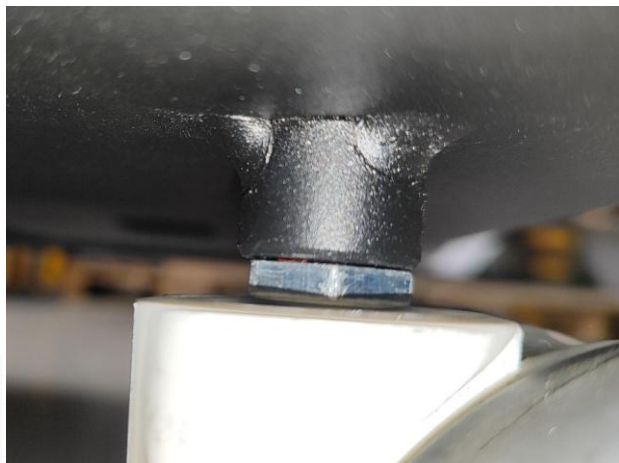

Sl. 7, 8. Kolesce 3

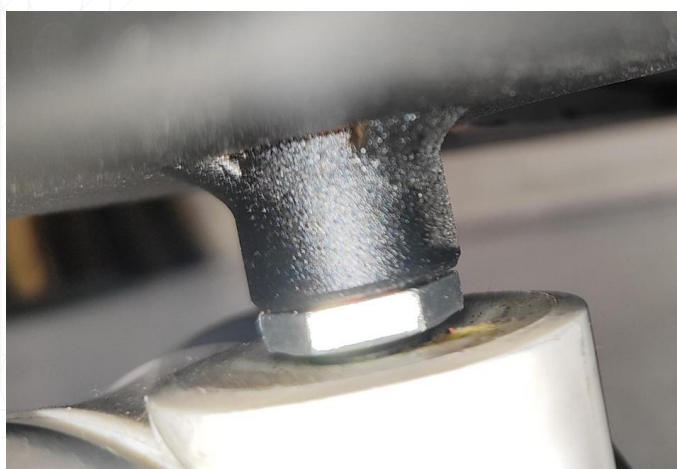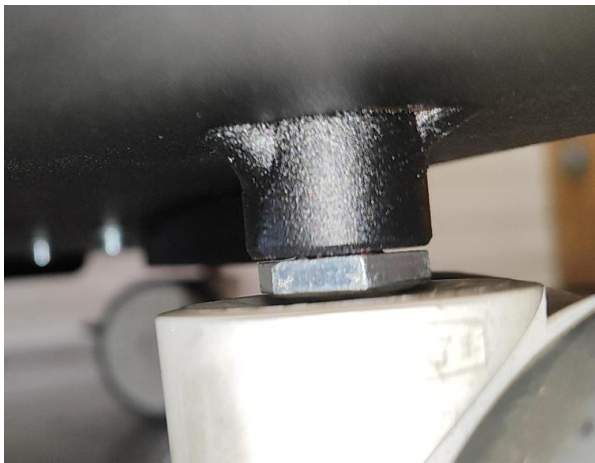

Sl. 9, 10. Kolesce 4



11 | Preglednica sprememb

Revizija	Opis sprememb	Datum	Oseba