

6. Obrazec za letni pregled vzdrževanja – svetilke Q-Flow™ T404339-8 (FSN #698414, 31. 3. 2026)

Izdelek/sistem	
Datum namestitve	
Serijska številka	
Številka stranke	
Kraj namestitve	
Datum uvedbe izdelka	

Navodila

V tem obrazcu so predstavljeni letni pregledi, ki jih je treba opraviti na svetilkah Merivaara Q-Flow. Da bi zagotovili varno uporabo osvetlitvenega sistema Q-Flow, izvedite potrebne ukrepe in preglede.

Ne uporabljajte okvarjene ali nepravilno nameščene opreme. Pod **Opombe** vnesite podrobnejše informacije o pregledih, če je to potrebno.

Pomembne informacije

- Ta obrazec za preglede velja le v povezavi z navodili za vgradnjo in vzdrževanje ter navodili za uporabo iz uporabniškega priročnika. Pri inšpekcijskih pregledih je treba priročnike uporabljati kot dopolnilne referenčne dokumente.
- Po 10 letih obratovanja (tj. ob izteku življenjske dobe izdelka) je treba te letne vzdrževalne ukrepe nadaljevati v skladu z navodili. Preverite celoten sistem in vse njegove sestavne dele, da se prepričate, da delujejo, kot je predvideno.
- Če se med pregledom ugotovi, da kateri koli od pregledanih elementov ne ustreza predpisom, svetilke in sistema ni dovoljeno uporabljati. To se izvede kot previdnostni ukrep, da se preprečijo nadaljnje telesne poškodbe in škoda na opremi.
- Poškodovane, deformirane ali manjkajoče sestavne dele je treba zamenjati. Za nove sestavne dele se obrnite na oddelek Merivaara After Sales.

Dokumentacija

Za te ukrepe in vodenje evidence v registru je odgovorna organizacija končnega uporabnika. Vsako leto kopirajte prazen obrazec te predloge, ga izpolnite in izpolnjen obrazec shranite na varno mesto. Prav tako je priporočljivo, da imate te podatke pri roki, ko naročate nadomestne dele.

	Preverjeno in odobreno		
Vizualni pregled	V redu	Ni opravljeno	Komentarji
Če je bila naprava izdelana pred junijem 2023, preverite, ali sta korektivna ukrepa št. 151397 in št. 698414 v servisni zgodovini označena kot izvedena. Po potrebi se za nasvet obrnite na servisno službo Merivaara.			
Deli svetilke niso deformirani in ne kažejo znakov poškodb (praske, razpoke itd.)			
Na površinah svetilk/-e ni poškodb barvnega premaza.			
Zaščitni pokrovi so pravilno nameščeni.			
Ni nobenih manjkajočih delov in noben del se ni razrahljal.			
Identifikacijska ploščica in nalepke na izdelku so na svojem mestu in so čitljive.			
Vsi LED-moduli delujejo brezhibno, svetloba pa ne utripa.			
Pokrivna stekla na sprednji strani so prozorna in brez motečih prask.			
Preverite, ali so sprednja stekla nepoškodovana.			
Na površinskem premazu ohišja svetilke ni vidnih znakov luščenja.			

	Preverjeno in odobreno		
Vizualni pregled	V redu	Ni opravlje	Komentarji
Silikonski robovi so pravilno nameščeni in na njih ni vidnih znakov luščenja.			
Sprednje steklo je popolnoma prozorno, odprtina za oddajanje svetlobe ni zamegljena.			
Na ohišju zaslona na dotik ali na stikih ni vidnega luščenja, ki bi ga povzročila nepravilna vsakodnevna čiščenje in razkuževanje.			
 POZORILLO			

- Tveganje, da sistem ali njegovi deli padejo, če je namestitev opravljena brezbržno.
- Tveganje padajočih delov. Ne stojte pod stropnimi cevmi ali njihovimi nosilnimi konstrukcijami med vzdrževanjem.

	Preverjeno in odobreno		
Preverjanje delovanja	V redu	Ni opravlje	Komentarji
Na nobenem spoju med ohišjem svetilke in osrednjo osjo ni prekomernega gibanja ali zračnosti. Po potrebi servisirajte spoje in pritrdilne mehanizme.			
Preverite, ali omejitev vrtenja glave svetilke deluje pravilno. Omejitev vrtenja mora biti prisotna in enaka v obeh smereh. Glava svetilke se ne sme prosto vrteti okoli svoje osi!			

Preverjanje delovanja	Preverjeno in odobreno		Komentarji
	V redu	Ni opravlje	
Zaščitni obroč in zagozda na spoju roke za uravnoteženje sta nameščena.			
Svetilka ostane v nastavljenem položaju in se gladko vrti po celotnem obsegu nastavitve.			
Vse mehanske funkcije ter možnosti nastavitve ročaja, ki ga je mogoče sterilizirati, delujejo, kot je predvideno.			
Zaslon na dotik in funkcije Intueri™ (serija Q-Flow i) delujejo pravilno.			
Funkcija sinhroniziranega krmiljenja svetilke Q-Flow ne krmili nobene druge svetilke Q-Flow v sosednjih prostorih.			
Fizično stikalo za vklop/izklop deluje pravilno.			
Kamera (če je nameščena) prenaša sliko brezhibne kakovosti.			
Kamera (če je nameščena) deluje brezhibno, če jo upravljate prek zaslona na dotik na glavi svetilke.			
Preverite, ali funkcija sinhroniziranega krmiljenja glavne svetilke Q-Flow in podrejene svetilke (če obstaja) ni sinhronizirana za krmiljenje katere koli druge svetilke Q-Flow.			

	Preverjeno in odobreno		
Preverjanje delovanja	V redu	Ni opravlje	Komentarji
Če imate daljinski upravljalnik Merimote, preverite, ali ni sinhroniziran za upravljanje katere koli druge svetilke Q-Flow.			

OBVESTILO

- izvajajte preglede električnih sistemov vsaj vsake tri leta ali ob zamenjavi električnega sestavnega dela.

	Preverjeno in odobreno		
Pregledi električnih sistemov	V redu	Ni opravlje	Komentarji
Preverjena sta upornost in neprekinjenost zaščitnega vodnika (IEC/EN 62353). Glejte dokument Preizkušanje električne varnosti (T405529).			

POZORILO

- Neupoštevanje teh letnih pregledov bo razveljavilo garancijo in lahko ogrozi varnost, ki je v tem primeru ni mogoče zagotoviti.

Zagotavljam, da so navedeni ukrepi usposabljanja izvedeni v skladu z navedenimi zahtevami:		
Leto pregleda (2–10):		
Podpis pregledovalca:		
Datum	Podpis/žig	Ime



MERIVAARA

Merivaara Corp.
Tarmontie 2–4
FI-15860 Hollola
FINSKA

www.merivaara.com