


## NAJPOMEMBNEJŠI KORAKI

### Postopek polnjenja oz. polnjenja cevke infuzijskega seta

Kako se izognete prekomernemu dovajanju insulina kmalu po zamenjavi infuzijskega seta


Zelo pomembno je, da upoštevate spodnja navodila, v skladu s katerimi preprečite, da bi se med postopkom polnjenja oz. polnjenja cevke po membrani infuzijskega seta razlila tekočina:

- a) Po polnjenju rezervoarja morate med odstranjevanjem modrega vmesnika držati vialo za insulin v pokončnem položaju. S tem preprečite, da bi se insulin nehote prenesel na vrh rezervoarja, od koder bi lahko prešel na membrano infuzijskega seta.

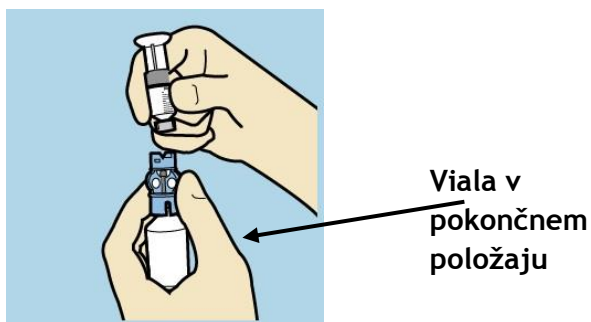

*Ko odstranjujete rezervoar, držite vialo v pokončnem položaju.*

- b) Če katera koli tekočina (na primer insulin, izopropilni alkohol ali voda) zaide na vrh rezervoarja ali v notranjost konektorja infuzijskega seta, lahko blokira membrano infuzijskega seta. Zaradi tega se med postopkom polnjenja oz. polnjenja cevke v komori rezervoarja za črpalko lahko poveča tlak. To lahko povzroči prekomerno polnjenje insulina kmalu po zamenjavi infuzijskega seta. Če na vrhu rezervoarja ali v notranjosti konektorja infuzijskega seta opazite tekočino, ponovite postopek z novim rezervoarjem in infuzijskim setom.

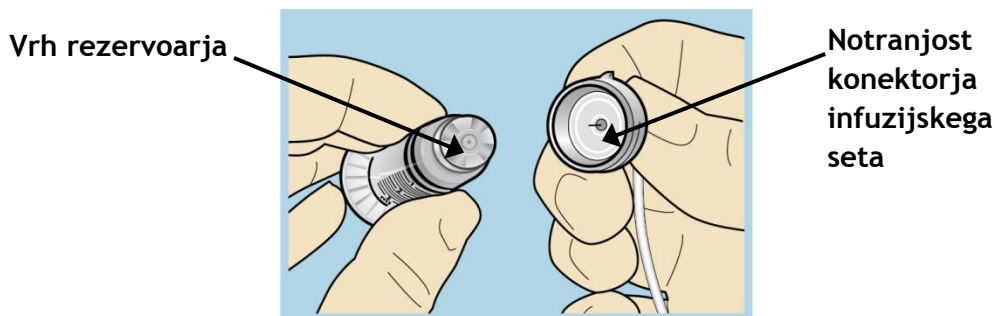

*Zagotovite, da sta vrh rezervoarja in konektor ob priključitvi suha.*

Če po končanem polnjenju oz. polnjenju cevke opazite kar koli nenavadnega, na primer, če iz kanile infuzijskega seta še vedno kaplja ali brizga inzulin, ga ne vstavljajte. Ponovite postopek z novim rezervoarjem in infuzijskim setom.

**Najboljše prakse za zamenjavo infuzijskega seta vključujejo te ukrepe:**

- Ne zamenjajte infuzijskega seta, preden se odpravite spat, saj tako ne morete nadzirati ravni glukoze.
- Poleg rednega spremljanja v okviru dodatnih varnostnih ukrepov preverite raven glukoze v krvi 1 uro po zamenjavi infuzijskega seta.

Z upoštevanjem teh načel najboljše prakse boste lahko prepoznali morebitne pojave hipoglikemije in hiperglikemije in ustrezno ukrepali.